

# ZM4

Impianti con connessione esagonale esterna





# ZM4

Impianti con connessione esagonale esterna







# Informazioni importanti

Leggere attentamente prima di utilizzare il prodotto Ziacom®

## Informazioni generali

Il presente documento contiene informazioni di base per l'uso dei sistemi di impianti dentali originali Ziacom®, di seguito "impianti dentali Ziacom®" o semplicemente "prodotti Ziacom®". La presente documentazione è stata elaborata come guida rapida di consultazione per il medico responsabile del trattamento, d'ora in avanti "utente" e non è quindi né un'alternativa né un sostituto della formazione specialistica e dell'esperienza clinica professionale.

I prodotti Ziacom® devono essere utilizzati realizzando un'adeguata programmazione del trattamento e seguendo rigorosamente i protocolli chirurgici e protesici stabiliti dal produttore. Prima di utilizzare un prodotto Ziacom®, leggere attentamente i protocolli chirurgici e protesici specifici per ciascun prodotto, nonché le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Possono essere consultati anche sul nostro sito web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com) oppure richiesti al distributore ufficiale autorizzato Ziacom® di zona.

## Informazioni su responsabilità, sicurezza e garanzia.

Le indicazioni d'uso e l'utilizzo dei prodotti Ziacom® si basano sulla bibliografia internazionale pubblicata, sugli standard clinici attuali e sulla nostra esperienza, motivo per il quale devono essere intese come informazioni generali indicative. La manipolazione e l'uso dei prodotti Ziacom®, essendo fuori dal controllo di Ziacom Medical SL, sono responsabilità esclusiva dell'utente. Ziacom Medical SL, le sue filiali e/o i distributori ufficiali autorizzati non si assumono alcuna responsabilità, espresa o implicita, totale o parziale, per i possibili danni o difetti scaturiti dall'uso improprio del prodotto o qualsiasi altro fatto non contemplato nei protocolli e nei manuali per l'utilizzo corretto dei prodotti.

L'utente deve assicurarsi che il prodotto Ziacom® utilizzato sia quello adatto alla procedura e alla finalità prevista. Né queste istruzioni per l'uso né i protocolli di lavoro o uso dei prodotti esentano l'utente da questo obbligo. L'uso, la gestione e l'applicazione clinica dei prodotti Ziacom® devono essere effettuati da personale qualificato con il titolo necessario in base alla legislazione vigente di ogni Paese.

L'uso, la alterazione e/o l'applicazione, in forma totale o parziale, in qualsiasi fase di realizzazione, dei prodotti Ziacom® da parte di personale non qualificato o senza il titolo necessario, invalida automaticamente qualsiasi tipo di garanzia e può provocare gravi danni alla salute del paziente.

I prodotti Ziacom® appartengono a un sistema autonomo, con caratteristiche progettuali e protocolli di lavoro specifici, che includono gli impianti dentali, gli attacchi o i componenti protesici e gli strumenti chirurgici o protesici. L'uso dei prodotti Ziacom® in combinazione con elementi o componenti di altri produttori può causare insuccesso del trattamento, danni ai tessuti, danni alle strutture ossee, risultati estetici inadeguati e gravi danni alla salute del paziente. Per questo motivo, utilizzare solo prodotti originali Ziacom®.

Il personale clinico incaricato del trattamento è l'unico responsabile della sorveglianza dell'uso dei prodotti originali Ziacom® e in conformità alle istruzioni per l'uso e ai relativi protocolli di manipolazione durante l'intero processo di trattamento implantologico. L'uso di componenti, strumenti o qualsiasi altro prodotto non originale Ziacom® da soli o in combinazione con uno qualsiasi dei prodotti originali Ziacom® invaliderà automaticamente la garanzia dei prodotti originali Ziacom®.

Consultare il Programma di Garanzia Ziacom Medical SL (disponibile sul sito web o contattando Ziacom Medical SL, le sue filiali o i distributori autorizzati).

**Avvertenza.** Non tutti i prodotti Ziacom® sono disponibili in tutti i Paesi. Verificare la disponibilità.

Il marchio Ziacom® e altri nomi di prodotti o servizi, nonché i relativi loghi, menzionati in questa documentazione o sul sito web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com), sono marchi registrati di Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL si riserva il diritto di modificare, cambiare ed eliminare qualsiasi prodotto, prezzo o specifiche tecniche a cui si fa riferimento sul suo sito web o in qualsiasi documento senza preavviso. Rimangono riservati tutti i diritti. Resta vietata la riproduzione o pubblicazione totale o parziale di questa documentazione, in qualsiasi supporto o formato, senza la corrispondente autorizzazione scritta da parte di Ziacom Medical SL.





## Indice

L'Azienda	06
Insieme per la salute	06
Qualità Ziacom®	06
Titanio Zitium®	06
Impegno per l'innovazione e la formazione	07
Ziacom® nel mondo	07
- Sede centrale	07
- Filiali	07

### ZM4 impianti con connessione esagonale esterna

Impianto ZM4	10
Caratteristiche	10
Diametri e lunghezze	11
Trattamenti superficiali	12
- Superficie Titansure	12
Confezioni del prodotto	14
Riferimenti ZM4	16
Consigli per l'uso	17
Come consultare questo catalogo	18
Scheda tecnica del prodotto	18
Simboli	18
Attacchi   Restauri diretti sull'impianto	20
Attacchi   Restauri con transepiteliali	30
Strumenti chirurgici	40
Strumenti protesici	48
Protocollo chirurgico	54
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione	76

## Insieme per la salute

Ziacom® lavora da oltre 20 anni per la **salute orale** e il benessere dei pazienti di tutto il mondo tramite **la progettazione e la produzione di soluzioni innovative** per impianti dentali, componenti protesici, strumenti chirurgici e biomateriali di altissima qualità.

Fondata nel 2004 con **capitale interamente spagnolo**, l'azienda ha iniziato la sua attività come produttore di impianti e attacchi implantari per diverse imprese del mercato europeo, introducendo i suoi primi **sistemi implantari a marchio proprio** nel 2006.

## Qualità Ziacom®

L'impegno per la **qualità e l'innovazione** ha fatto parte dei valori e dell'essenza di Ziacom® fin dalla sua nascita.

Per questo motivo, applichiamo la tecnologia più avanzata in **tutte le fasi del ciclo di produzione** dei nostri prodotti, dalla **progettazione e produzione** ai processi di **verifica, pulizia fino al confezionamento**. Inoltre, per la produzione di tutti i nostri prodotti utilizziamo unicamente **materie prime di alta qualità** e applichiamo **controlli rigorosi durante i processi** di selezione dei nostri fornitori principali.

Ziacom Medical SL è titolare della **licenza di produttore di dispositivi medici** e **dell'autorizzazione all'immissione in commercio** da parte dell'AEMPS 6425-PS (Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici); inoltre, il nostro **sistema di gestione della qualità è certificato**

Nel 2015 Ziacom® ha avviato la sua **strategia di diversificazione** sviluppando **nuove linee di business**, gamme di prodotti e l'introduzione di un **nuovo portfolio** che, nel 2016, ha portato l'azienda a raggiungere il **15% della quota del mercato spagnolo** con la vendita di oltre 230.000 impianti.

Nel 2022, l'azienda ha intrapreso un **ambizioso progetto di crescita** con nuovi obiettivi di **espansione internazionale**, ampliamento e **diversificazione** del portfolio di **prodotti e servizi**, così come il cambiamento dell'identità aziendale.

in conformità ai requisiti delle norme UNE-EN-ISO 9001:2015 e UNE-EN-ISO 13485:2018, rispettando altresì la normativa GMP 21 CFR 820 degli Stati Uniti.




Grazie al costante impegno per offrire la massima qualità ai nostri clienti, tutti i nostri impianti godono di una **garanzia a vita**.

Vedere le Condizioni generali di accesso alla garanzia per i prodotti Ziacom®.

## Titanio Zitium®

Gli impianti **ZM4** di Ziacom® sono realizzati in **titanio grado 4 ad altissima resistenza Zitium®** che offre un **sostanziale miglioramento** del limite di snervamento e delle proprietà meccaniche.

Grazie al titanio **Zitium®** i nostri impianti mantengono la conformità ai requisiti delle norme ASTM F67 e ISO 5832-3 e sono certificati ai sensi dei requisiti del Regolamento 2017/745, ottenendo la corrispondente marcatura CE dell'organismo notificato 0051.

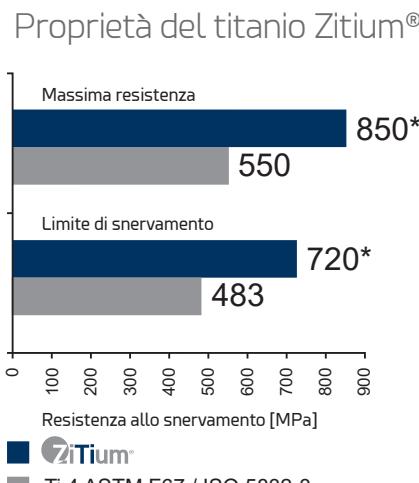

**FDA Approved\***

\*Verificare i modelli approvati

Gli impianti Ziacom® vengono sterilizzati mediante irradiazione con raggi Beta a 25 kGy, a eccezione degli impianti ortodontici DSQ, che vengono commercializzati **non sterili**.

### IMPORTANTE

Tutti i prodotti (a eccezione degli impianti dentali) elencati in questo catalogo Ziacom® vengono commercializzati non sterili e devono essere sterilizzati prima dell'uso.



## Impiego per l'innovazione e la formazione

Con l'obiettivo di offrire sempre le migliori soluzioni per il **benessere di ogni paziente**, grazie all'esperienza e alla dedizione di **professionisti altamente qualificati** e a un **Centro tecnologico innovativo**, il nostro team di R&S e innovazione lavora quotidianamente a un processo costante di **ricerca e innovazione** per il **miglioramento continuo** dei nostri prodotti e per lo sviluppo di **nuove soluzioni** che rispondano alle richieste e alle esigenze di pazienti e professionisti.

Manteniamo, inoltre, un chiaro impegno a favore della **ricerca e della formazione costante** come mezzo per fornire **sostegno scientifico al settore**. Crediamo fortemente nella formazione dei giovani professionisti quale migliore garanzia per **l'evoluzione dell'odontoiatria**.

Pertanto, collaboriamo con **centri di formazione, università e società scientifiche** per creare un ambiente didattico pratico e specializzato che rafforzi le conoscenze, le competenze e la crescita professionale.

Nel nostro impegno per la formazione e lo **sviluppo di professionisti** del settore, presso le nostre strutture disponiamo di **spazi specifici per corsi formativi e attività pratiche (hands-on)**, attrezzature di formazione **all'avanguardia**, nonché uno **showroom fisico e virtuale** per conoscere da vicino tutte le nostre soluzioni odontoiatriche.

## Ziacom® nel mondo

Con l'impegno di portare la salute orale ai pazienti di tutto il mondo, prevediamo un solido **piano di crescita ed espansione internazionale** per rafforzare la **presenza** dell'azienda nelle **aree già consolidate**, oltre a incorporarne altre per una **nuova crescita**.

A tal fine, offriamo ai nostri **partner internazionali** un rapporto di **fiducia e collaborazione**, adattandoci alle loro **esigenze locali** con soluzioni su misura per ogni mercato.

Alla ricerca della conformità ai requisiti di **qualità, normativi e legali specifici di ciascun Paese**, sia per i processi di registrazione che di distribuzione dei nostri prodotti, disponiamo delle **certificazioni specifiche** per tutti i territori in cui operiamo.

### Sede centrale

### Ziacom Medical

Madrid - SPAGNA  
Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto  
 +34 91 723 33 06

## Filiali

### Ziacom Lusobionic

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B  
1050 -165 - Lisbona - PORTOGALLO  
 +351 215 850 209

### Ziacom Medical USA LLC

Miami - USA  
333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000  
Miami, FL 33131 - USA  
 +1(786) 224 - 0089


### Ziacom ITS

Viale del Lavoro, 14  
35010 Vigonza  
Padova - ITALIA  
 +39 049 603310

### Ziacom Safe implant

Av. Iñaquito, Edificio Metropolitan,  
Oficina 304  
170507, Quito - ECUADOR  
 +593 96 368 0879

È possibile consultare l'elenco aggiornato dei distributori Ziacom® sul sito web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com) o inviando un'e-mail all'indirizzo [export@ziacom.com](mailto:export@ziacom.com)

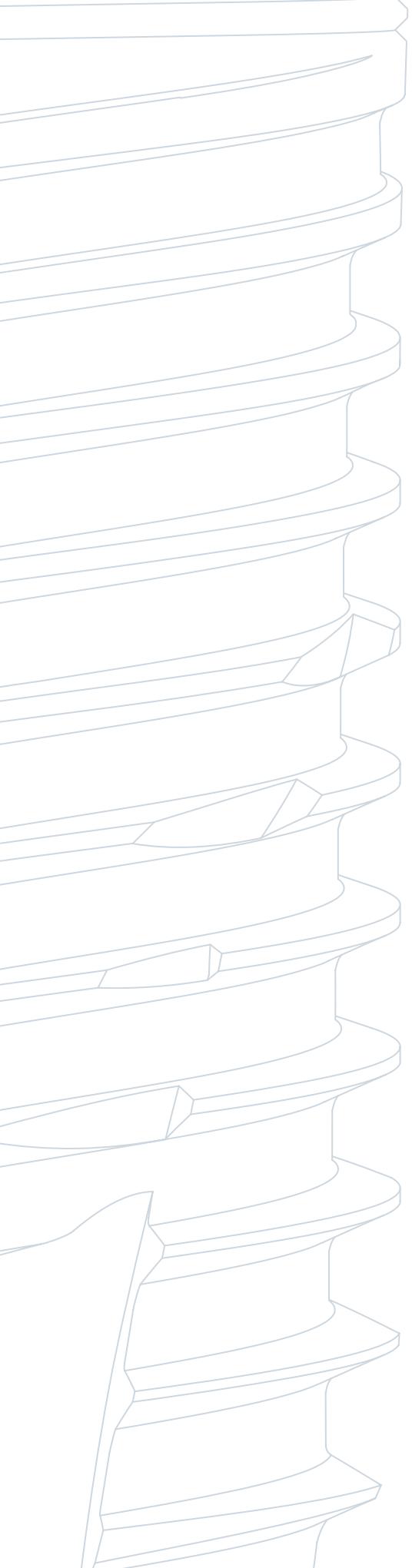

ZM4

**ZM4** |   
Impianti con connessione esagonale esterna



# Impianto ZM4

## Caratteristiche

### CONNESSIONE


- Connessione a esagono esterno.
- Canale della vite con guida superiore: facilita l'inserimento delle viti.

### AREA CORTICALE

- Anello lavorato di 0,4 mm: permette di elevare il gap protesico rispetto alla cresta ossea in biotipi medio/spessi; evita l'esposizione della superficie trattata in cresta irregolare.
- Design con microfilettatura: preserva l'osso marginale.
- Estensione microfilettatura: migliora la distribuzione dei carichi.
- Macro-design: compressione corticale ottimale.

### CORPO

- Spire attive ad angolazione ridotta: favoriscono la stabilità durante l'inserimento e aumentano il contatto osso-impianto (BIC).
- Spira doppia: inserimento rapido e riduzione dei tempi chirurgici.
- Apice attivo autofilettante: facilita l'inserimento con fresatura sottodimensionata.
- Finestre apicali trasversali: raccolgono i detriti ossei durante l'inserimento.
- Morfologia ottimizzata: elevata stabilità primaria.
- Apice atraumatico: protegge le strutture anatomiche.

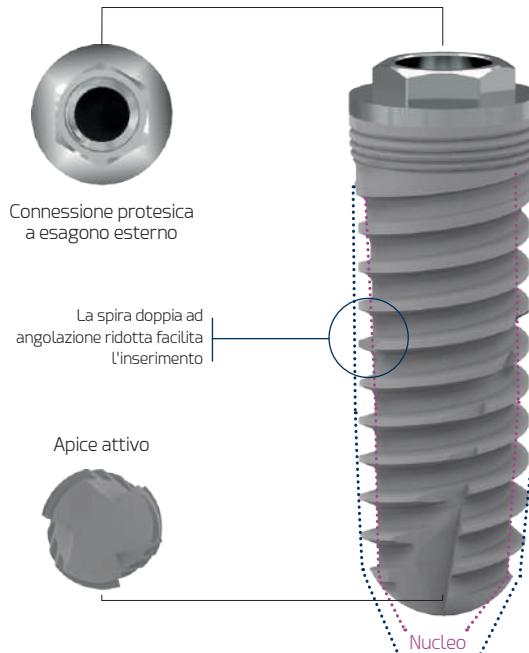

## Punti di forza

- Semplicità di design: gli impianti cilindrici hanno una forma tubolare costante lungo tutta la loro lunghezza. Questo li rende più facili da posizionare.
- Stabilità iniziale: offrono un buon sostegno. Sono ideali per pazienti con sufficiente densità ossea nella zona di posizionamento.
- Durata: gli impianti cilindrici sono affidabili e duraturi. Forniscono una base solida per la corona o protesi dentale.

## Diametri e lunghezze

Ø DIAMETRO	Ø PIATTAFORMA	LUNGHEZZA (L)						
		6	7	8,5	10	11,5	13	14,5
■ NP 3,30	3,30							
■ RP 3,70								
■ RP 4,00	4,10							
■ RP 4,30								
■ WP 4,60	5,00							
■ WP 5,00								

Dimensioni in mm.

# Impianto ZM4

## Trattamenti superficiali

### ■ Superficie Titansure

È stato dimostrato che le superfici trattate migliorano l'osteointegrazione grazie al maggior contatto osso-impianto. Ciò è dovuto in parte alla composizione chimica dell'impianto e anche alle sue caratteristiche topografiche.




Grazie alla superficie **Titansure**, Ziacom® ottiene una topografia superficiale priva di contaminanti, nonché macro e microporosità con valori medi ottimali le cui caratteristiche sono fondamentali per ottenere un'osteointegrazione, conferendo così un'ottima affidabilità e un'elevata prevedibilità.

#### ■ ANALISI DELLA SUPERFICIE TITANSURE

La superficie **Titansure** è di tipo S.L.A. e si ottiene per sottrazione mediante sabbiatura con corindone bianco e doppia incisione con acido fluoridrico e combinazione di acido solforico e fosforico.


#### Analisi morfologica della superficie

Utilizzando un microscopio elettronico a scansione (FEI TENEON, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, U.S.A.), è stato possibile osservare la superficie ruvida e porosa con numerose cavità dai bordi sottili e taglienti.

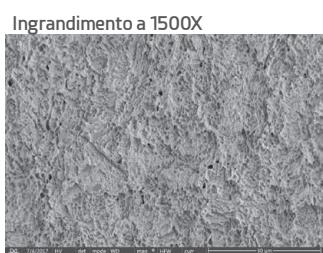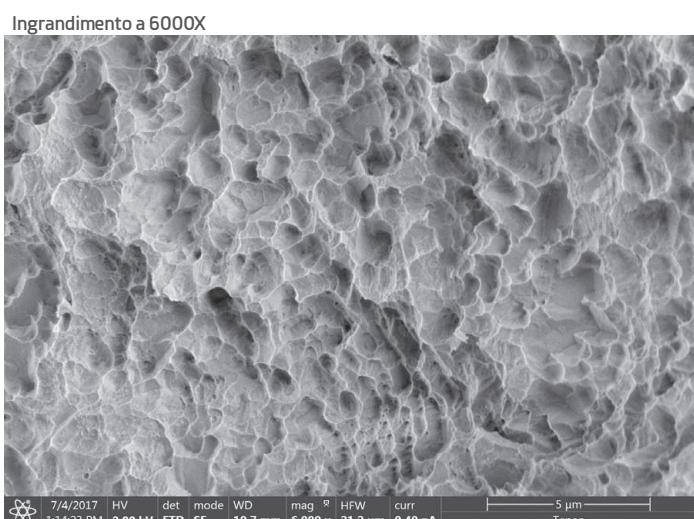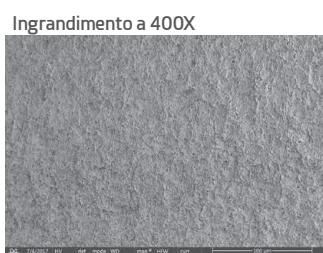

#### Analisi elementare della superficie

Utilizzando uno spettrometro a raggi X a dispersione di energia (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, U.S.A.), è stata analizzata la composizione chimica della superficie.

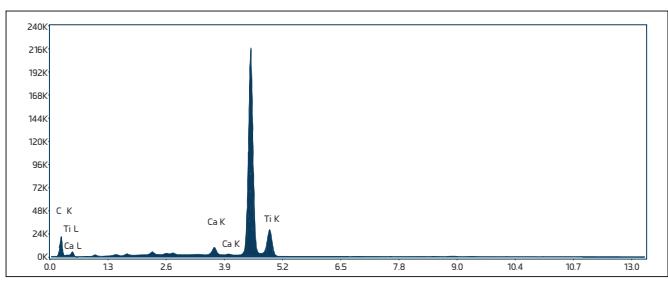

#### Analisi della composizione della superficie implantare

ELEMENTO	PESO (%)
C K	9,32 (10,23)
Al K	-
Ti K	89,53 (11,77)

Non è stata rilevata la presenza di alluminio

I risultati dell'analisi sono espressi come media e deviazione standard della percentuale di contenuto di massa (PESO (%)).


### Analisi della ruvidità superficiale

Lo studio della ruvidità è stato eseguito con microscopio confocale-interferometrico Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrassa, Spagna) e software SensoMAP Premium 7.4. Come parametri quantitativi di ruvidità sono stati utilizzati: ruvidità media del profilo (Ra), deviazione media del profilo di ruvidità (Rq), altezza massima del picco del profilo di ruvidità (Rp) e profondità massima del picco negativo del profilo di ruvidità (Rv).

Ra ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Rq ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Rp ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Rv ( $\mu\text{m}$ ) (SD)
0,82 (0,10)	0,97 (0,08)	1,84 (0,04)	2,21 (0,01)

Sono state registrate anche la ruvidità superficiale tridimensionale (Sa), l'altezza tridimensionale media (Sq), l'altezza massima del picco tridimensionale (Sp) e la profondità massima del picco negativo dell'area selezionata (Sv).

Sa ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Sq ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Sp ( $\mu\text{m}$ ) (SD)	Sv ( $\mu\text{m}$ ) (SD)
0,76 (0,01)	0,97 (0,01)	4,20 (0,12)	4,62 (0,20)

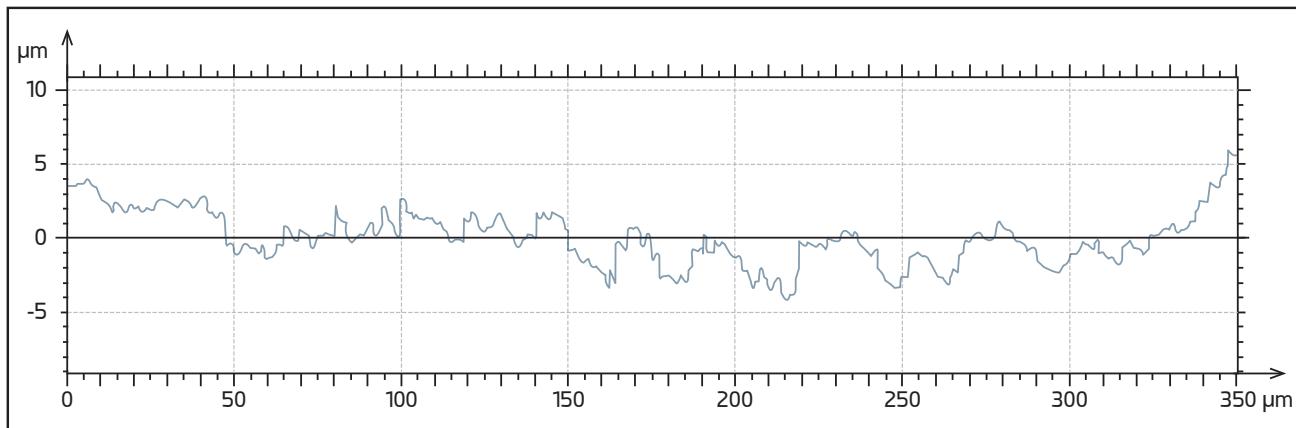

I dati sono stati estratti dalla seguente pubblicazione:

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

### ■ OSTEOINTEGRAZIONE OTTIMALE

La superficie **Titansure** è caratterizzata da una struttura superficiale tridimensionale con picchi alti e picchi negativi ampi, nota per essere molto efficace nel promuovere la cascata di coagulazione e il rilascio di fattori di crescita attraverso l'attivazione piastrinica [Kim, H.; Choi, S.H.; Ryu, J.J.; Koh, S.Y.; Park, J.H.; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011].

Questo tipo di superficie potrebbe avere un effetto osteogenico grazie alle sue diverse caratteristiche topografiche a livello micrometrico e nanometrico, con morfologia molto simile alle cavità di riassorbimento osteoclastico delle ossa [Le Guehenneec, L.; Goyenvalle, E.; Lopez-Heredia, M.A.; Weiss, P.; Amouriq, Y.; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103-1110].

Per ulteriori informazioni sul trattamento superficiale, consultare la bibliografia disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)



# Impianto ZM4

## Confezioni del prodotto

### ■ Confezionamento in blister

Disponibile per impianti con superficie **Titansure**. Il blister è termosaldato e include un'etichetta di identificazione del prodotto per una corretta tracciabilità. La linguetta facilita l'apertura presso la clinica e previene l'apertura accidentale.

## Titansure




### IMPORTANTE

Aprire il contenitore sterile unicamente al momento del posizionamento dell'impianto.

### ■ Etichetta di identificazione esterna

Gli impianti Ziacom® sono contenuti in una scatola di cartone sigillata che include l'etichetta di identificazione del prodotto con la descrizione delle sue caratteristiche principali.

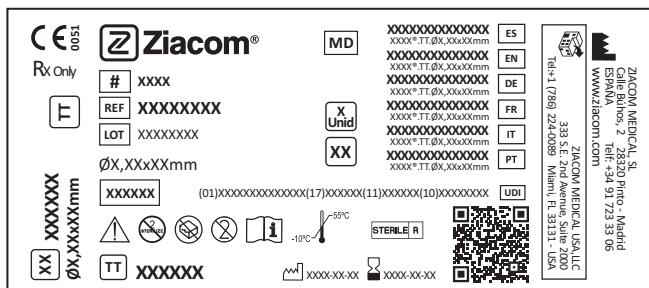

### Spiegazione dei simboli utilizzati

	Marcatura CE (MDR) e numero dell'organismo notificato.
	Indicatore di dispositivo medico.
	Codice del modello.
	Nome del prodotto.
	Numero di lotto del prodotto.
	Identificazione unica del prodotto.
	Sterilizzato mediante irradiazione.
	Limite di temperatura.
	Prestare attenzione, consultare la documentazione allegata.
	Non sterilizzare nuovamente.
	Solo dietro prescrizione medica.
	Distributore del prodotto.

Per i dettagli completi sulle confezioni del prodotto e le relative istruzioni per l'uso (IFU), andare alla pagina [www.ziacom.com/ifus](http://www.ziacom.com/ifus) o utilizzare il codice QR riportato sulla scatola.



## ■ Mount ZPlus

L'impianto ZM4 è accompagnato dal Mount **ZPlus**, un abutment multifunzione progettato in titanio grado 5 ELI (per uso sanitario) che facilita la manipolazione dell'impianto durante l'intervento chirurgico e incorpora molteplici funzioni di utilizzo. Inoltre, il concetto fondamentale del Mount **ZPlus** è la riduzione dei costi di trattamento grazie alla possibilità di essere utilizzato come portaimpianto, abutment da impronta o abutment provvisorio per fissaggio a vite-cemento.

Il Mount **ZPlus** è disponibile per le gamme di impianti Zinic® SX, Zinic® MTX, ZM4, ZM4 MT e ZM1.


Come abbiamo indicato, il Mount **ZPlus** può essere utilizzato come abutment provvisorio. In questi casi, la lavorazione del **ZPlus** deve avvenire per via extraorale, regolandolo nell'analogo e preferibilmente sul modello da laboratorio o montato sul supporto. Inoltre, è necessario verificare l'integrità strutturale del Mount e della relativa vite e che non abbiano subito deformazioni o deterioramenti a causa di un torque eccessivo di inserimento o una manipolazione forzata di rimozione. È necessario controllare anche l'assestamento corretto della vite di fissaggio del **ZPlus** e la regolazione della connessione nell'analogo.

### IMPORTANTE

L'impianto deve essere sempre posizionato secondo le specifiche del protocollo chirurgico per proteggere il Mount e la relativa vite da possibili danni che ne impediscono l'uso successivo come abutment da impronta e/o abutment provvisorio. Ogni **ZPlus** deve essere utilizzato unicamente sull'impianto a cui appartiene. Il **ZPlus** e la relativa vite devono essere conservati assieme all'identificazione del paziente, indicando il riferimento e il lotto dell'impianto per evitare di confonderli o scambiarli. Il **ZPlus** presenta 3 lati piatti. Al termine dell'inserimento dell'impianto, assicurarsi che uno di essi corrisponda all'area vestibolare.


### Usi del Mount **ZPlus**

#### Come portaimpianti

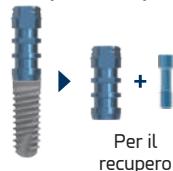

Per il recupero

#### Come abutment da impronta

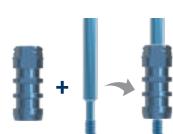


#### Come abutment provvisorio per fissaggio a vite-cemento



Taglio



11,00 mm

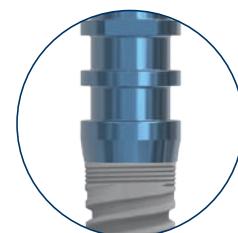

Vista dell'impianto + Mount

# Impianto ZM4


## Riferimenti ZM4

### ■ Riferimenti ZM4 con ZPlus - Titansure

**ZM4**

#### IMPIANTO

Ø Misura (mm)	Ø Nucleo (mm)	Lunghezza (mm)	Rif. Titansure	
3,30	2,80/2,50	8,5	ZM43385	
		10,0	ZM43310	
		11,5	ZM43311	
		13,0	ZM43313	
		14,5	ZM43314	
3,70	3,20/2,80	8,5	ZM43785	
		10,0	ZM43710	
		11,5	ZM43711	
		13,0	ZM43713	
		14,5	ZM43714	
4,00	3,40/3,05	6,0	ZM44006	
		7,0	ZM44007	
		8,5	ZM44085	
		10,0	ZM44010	
		11,5	ZM44011	
		13,0	ZM44013	
		14,5	ZM44014	
4,30	3,70/3,30	6,0	ZM44306	
		7,0	ZM44307	
		8,5	ZM44385	
		10,0	ZM44310	
		11,5	ZM44311	
		13,0	ZM44313	
		14,5	ZM44314	
4,60	3,90/3,55	6,0	ZM44606	
		7,0	ZM44607	
		8,5	ZM44685	
		10,0	ZM44610	
		11,5	ZM44611	
		13,0	ZM44613	
5,00	4,15/3,75	6,0	ZM45006	
		7,0	ZM45007	
		8,5	ZM45085	
		10,0	ZM45010	
		11,5	ZM45011	
		13,0	ZM45013	

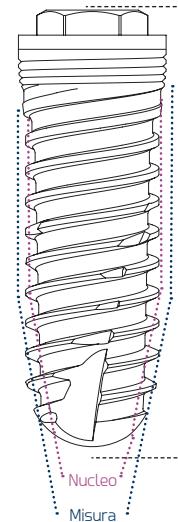

Lunghezza

Nucleo

Misura

#### Vite di fissaggio\*



Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
NP	5,00	OEXNPT
RP	5,00	OEXRPT
WP	4,90	OEXWPT

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP






\* Vite già inclusa in ogni impianto.

#### Filettatura metrica



Filettature metriche da 1,80 (NP) e 2,00 (RP/WP)

#### Piattaforma

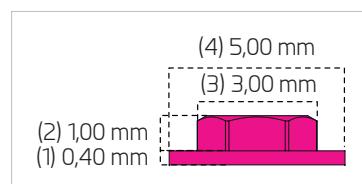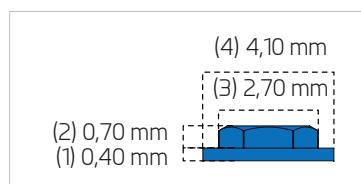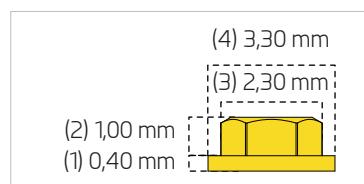

(1) Zona meccanizzata senza trattamento, (2) Altezza dell'esagono esterno. (3) Distanza tra i lati dell'esagono esterno. (4) Diametro della piattaforma di lavoro.

## Consigli per l'uso

Tutti i trattamenti implantologici devono rispettare la naturale stabilità biomeccanica della cavità orale e consentire la naturale emergenza della corona dentale attraverso i tessuti molli. L'implantologo deve valutare la quantità e la qualità dell'osso esistente nell'area di ricezione dell'impianto e considerare la necessità di una rigenerazione ossea precedente o contemporanea in base al caso specifico.

Ziacom® dispone di un'ampia gamma di impianti per coprire tutte le possibilità di restauro esistenti. I quadratini presenti nell'odontogramma mostrato rappresentano i diametri e le piattaforme degli impianti raccomandati per ciascuna posizione dentale.

Queste raccomandazioni sono valide per la sostituzione di denti con restauri a dente singolo, ponti, ibridi o overdenture.

Ricordare di mantenere le distanze minime tra impianti adiacenti e tra impianti e denti per preservare le papille, la vascolarizzazione ossea e i profili di emergenza naturali.

La scelta dell'impianto corretto caso per caso è responsabilità esclusiva dell'implantologo. Ziacom® raccomanda di tenere conto delle avvertenze basate su prove scientifiche raccolte nei cataloghi dei prodotti e sul sito web.

### ■ CHIARIMENTI SULLE MISURE E SULLE TECNICHE DI FRESATURA

- **MISURA DELL'IMPIANTO:** identifica il diametro e la lunghezza dell'impianto.
- **CORPO DELL'IMPIANTO:** diametro del nucleo dell'impianto.
- **MISURA DELLA FRESA:** corrisponde al diametro della fresa.
- **TECNICA DI FRESATURA:** abbiamo sviluppato diversi protocolli di fresatura per permettere di affrontare in modo schematizzato le diverse situazioni che si presentano in caso di interventi chirurgici con impianti.

Per ulteriori informazioni sulla scelta della misura dell'impianto, consultare la bibliografia disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)



## Odontogramma

ZM4


### Diametro dell'impianto<sup>(1)</sup>

NP	A	RP	B	RP	C	RP	WP	WP	WP
Ø3,30 mm	Ø3,70 mm	Ø4,00 mm	Ø4,30 mm	Ø4,60 mm	Ø5,00 mm				

(1) I diametri sono disponibili per le piattaforme equivalenti


### Diametro coronale dell'impianto

NP	RP	WP
Ø3,30 mm	Ø4,10 mm	Ø5,00 mm

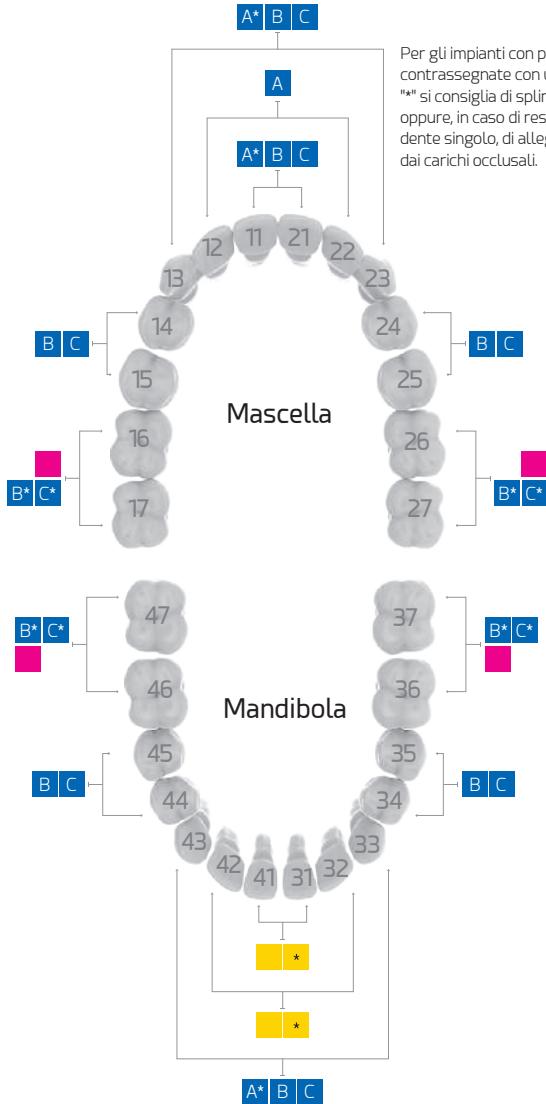

# Come consultare questo catalogo

## Scheda tecnica del prodotto

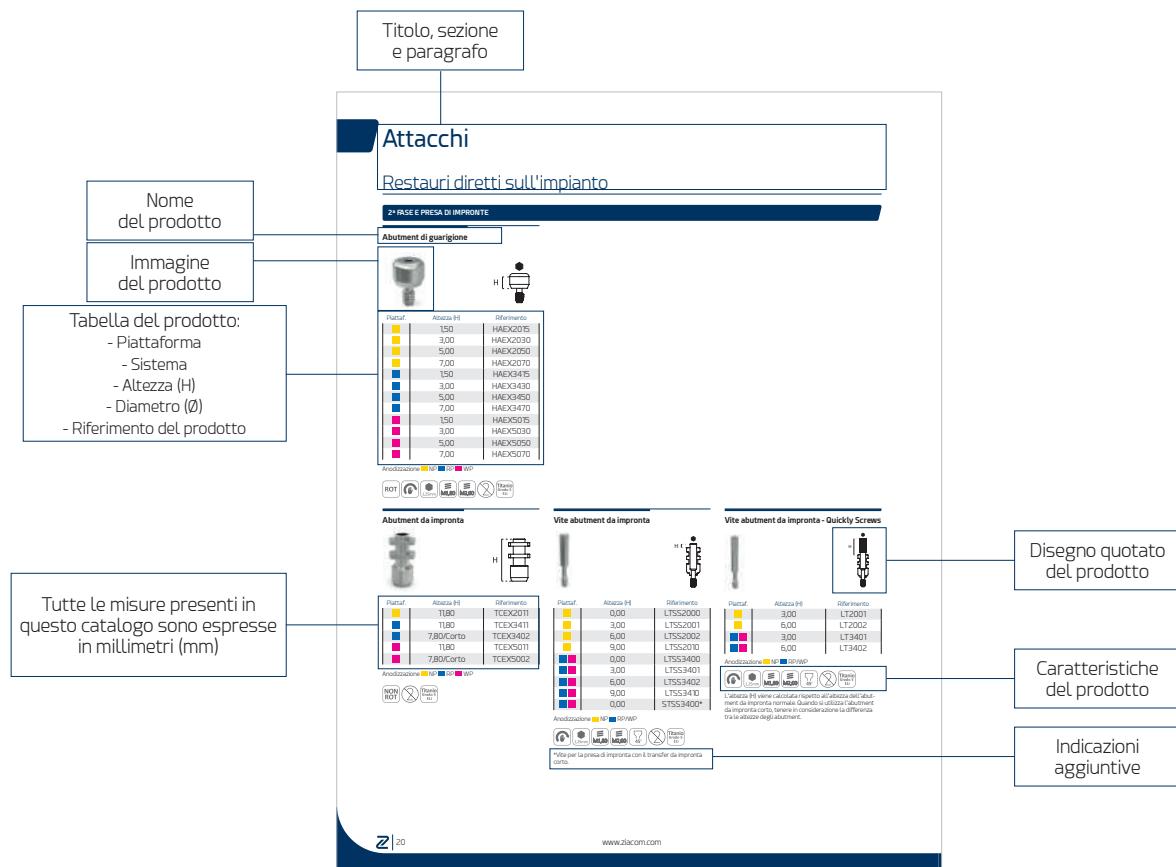

## Simboli

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Elemento rotante		Connessione Tx30		Realizzato in Acciaio
	Elemento non rotante		Filettatura metrica in millimetri		Realizzato in Cromo-Cobalto + plastica calcinabile
	Aplicare un torque manuale (vedere la tabella a pag. 38)		Supporto per vite a 45°		Realizzato in Cromo-Cobalto
	Torque massimo di utilizzo		Supporto per vite a 90°		Realizzato in PEEK
	Gamma di coppie della chiave dinamometrica		Uso in rotazione con CA		Realizzato in plastica calcinabile
	Connessione Galaxy		Velocità massima di rotazione		Realizzato in plastica
	Connessione della vite 1,25mm		Numero massimo di utilizzi		Temperatura di sterilizzazione consigliata
	Connessione Kirator		Prodotto monouso		Prodotto non sterilizzato
	Connessione Nature		Realizzato in Titanio Grado 5 ELI (a basso contenuto di elementi interstiziali)		Usare con irrigazione abbondante
	Connessione Basic		Realizzato in Titanio Grado 2		Angolazione massima
	Connessione XDrive		Realizzato in Acciaio inox		

# Attacchi

Restauri diretti  
sull'impianto




# Attacchi

## Restauri diretti sull'impianto

### 2<sup>a</sup> FASE E PRESA DI IMPRONTA

#### Abutment di guarigione

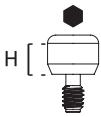


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,50	HAEX2015
■	3,00	HAEX2030
■	5,00	HAEX2050
■	7,00	HAEX2070
■■	1,50	HAEX3415
■■	3,00	HAEX3430
■■	5,00	HAEX3450
■■	7,00	HAEX3470
■■■	1,50	HAEX5015
■■■	3,00	HAEX5030
■■■	5,00	HAEX5050
■■■	7,00	HAEX5070

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP



#### Abutment da impronta

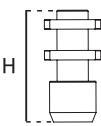


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	11,80	TCEX2011
■■	11,80	TCEX3411
■■■	7,80/Corto	TCEX3402
■■■	11,80	TCEX5011
■■■	7,80/Corto	TCEX5002

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP



#### Vite abutment da impronta

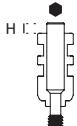


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	0,00	LTSS2000
■■	3,00	LTSS2001
■■■	6,00	LTSS2002
■■■	9,00	LTSS2010
■■■■	0,00	LTSS3400
■■■■	3,00	LTSS3401
■■■■	6,00	LTSS3402
■■■■	9,00	LTSS3410
■■■■	0,00	STSS3400*

Anodizzazione ■ NP ■ RP/WP



\*Vite per la presa di impronta con il transfer da impronta corto.

#### Vite abutment da impronta - Quickly Screws

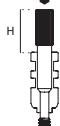

Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	3,00	LT2001
■■	6,00	LT2002
■■■	3,00	LT3401
■■■	6,00	LT3402

Anodizzazione ■ NP ■ RP/WP




L'altezza (H) viene calcolata rispetto all'altezza dell'abutment da impronta normale. Quando si utilizza l'abutment da impronta corto, tenere in considerazione la differenza tra le altezze degli abutment.

**Abutment da impronta Pick-Up**



Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
	1,60	PUEX2000
	1,60	PUEX3400
	1,60	PUEX5000

Anodizzazione NP RP WP

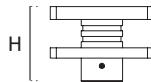
**Transfer da impronta Pick-Up**


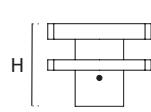
Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
	7,25	CPU3410

Set di 4 unità. NON sterilizzare in autoclave. Accorciabile.

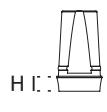**Abutment da impronta Z2Plus Snap-On**


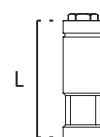
Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
	1,50	Z2NPEX10
	1,50	Z2RPEX10
	1,50	Z2WPEX10

Anodizzazione NP RP WP


**Transfer da impronta Z2Plus Snap-On**


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
	8,00	ZPU3400
	8,00	ZPU5000


Set di 4 unità. NON sterilizzare in autoclave. Accorciabile.

**Analogo di impianto**


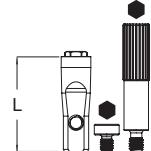
Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	12,00	IAEX2000
	12,30	IAEX3400
	12,00	IAEX5000


**IMPORTANTE**

Per fissare questo abutment da impronta utilizzare la vite da laboratorio.

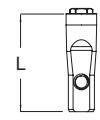**Analogi di impianto 3D - Singolo**


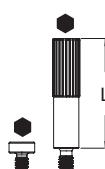
Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	13,00	IAEX2008D
	13,00	IAEX3408D
	13,00	IAEX5008D


**Analogi di impianto 3D - Set**


Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	13,00	IAEX2008DC*
	13,00	IAEX3408DC*
	13,00	IAEX5008DC*



\* Include la vite di base Rif. DSIADI e la vite laterale Rif. DSIADT per la connessione dell'analogo.

**Viti - Analogi 3D**


Tipo	Lunghezza (L)	Riferimento
Vite di base (1)*	-	DSIADI
Vite laterale (2)*	15,00	DSIADT




\* Set di 4 unità.

# Attacchi

## ELEMENTI DI FISSAGGIO

### Vite clinica

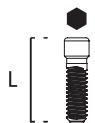

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	8,30	DSEI2000
	8,30	DSEI3400

Anodizzazione NP RP/WP



### Vite clinica Kiran



Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	8,30	DSEI2010
	8,30	DSEI3410



Vite speciale Kiran con trattamento superficiale.

### Vite da laboratorio




Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	7,40	LB102000
	7,40	LB103400



Vite NON adatta per l'uso come vite clinica definitiva.

### Vite clinica Kiran Tx30

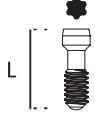

### Per abutment e Ti-Base ZiaCam Tx30

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	6,80	DSEI2010TX
	6,80	DSEI3410TX



Vite speciale Kiran con trattamento superficiale.

Da utilizzare solo con cacciaviti Tx30.

## PROVVISORI

### Abutment provvisorio



### Abutment provvisorio

Abutment estetico e per carico immediato



### Rotante

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	9,50	RUEXT2010
	9,50	RUEXT3410
	9,50	RUEXT5010

Anodizzazione NP RP WP



### Non rotante

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	9,50	NUEXT2010
	9,50	NUEXT3410
	9,50	NUEXT5010

Anodizzazione NP RP WP



### Rotante


Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	9,50	RUEXP2010
	9,50	RUEXP3410
	9,50	RUEXP5010



### Non rotante

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	9,50	NUEXP2010
	9,50	NUEXP3410
	9,50	NUEXP5010

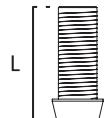


**FISSAGGIO A VITE**
**■ UCLA**
**UCLA**

**Rotante**

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	11,00	RUEX2000
	11,00	RUEX3400
	11,00	RUEX5000


**Non rotante**

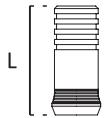Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	11,00	NUEX2000
	11,00	NUEX3400
	11,00	NUEX5000


**■ UCLA BASE LAVORATA**
**Abutment base lavorata**
**+ Abutment calcinabile**

**Rotante**

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	10,60	BRUEX20
	10,60	BRUEX34
	10,60	BRUEX50


**Non rotante**

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	10,60	BNUEX20
	10,60	BNUEX34
	10,60	BNUEX50



ZM4



# Attacchi

## FISSAGGIO A VITE

### ■ ABUTMENT Tx30 ROTAZIONE VARIABILE

#### Abutment base lavorata Tx30 + 2 Abutment calcinabili (15° e 20°)



#### Rotante

Piattaf.	15° Lunghezza (L)	20° Lunghezza (L)	Riferimento
■	11,40	11,20	BRUEX20TX
■	11,40	11,20	BRUEX34TX
■	11,40	11,20	BRUEX50TX



#### Non rotante

Piattaf.	15° Lunghezza (L)	20° Lunghezza (L)	Riferimento
■	11,40	11,20	BNUEX20TX
■	11,40	11,20	BNUEX34TX
■	11,40	11,20	BNUEX50TX



#### Abutment base lavorata Tx30 + 2 Abutment calcinabili (20° e 25°)



#### Rotante

Piattaf.	20° Lunghezza (L)	25° Lunghezza (L)	Riferimento
■	11,20	11,00	BRUEX20TX1
■	11,20	11,00	BRUEX34TX1
■	11,20	11,00	BRUEX50TX1



#### Non rotante

Piattaf.	20° Lunghezza (L)	25° Lunghezza (L)	Riferimento
■	11,20	11,00	BNUEX20TX1
■	11,20	11,00	BNUEX34TX1
■	11,20	11,00	BNUEX50TX1



Include la vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale Rif. DSEI2010TX (NP)/DSEI3410TX (RP/WP) per tutti gli abutment Tx30 Rotazione Variabile.

### ■ ABUTMENT TX30 ROTAZIONE VARIABILE


L'abutment Tx30 Rotazione Variabile è costituito da una base lavorata di Cr-Co sulla quale vengono montanti abutment calcinabili angolati a 15°, 20° o 25° e una vite clinica Kiran con connessione speciale di tipo Tx30.

La base di Cr-Co, essendo prefabbricata, garantisce aderenza e tenuta ottimali alla connessione dell'impianto e le varie angolazioni degli abutment calcinabili consentono di selezionare il posizionamento migliore per un'emergenza adeguata del canale di accesso alla vite del restauro.



Scanalature indicanti le angolazioni dei calcinabili

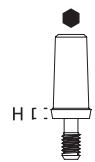

**FISSAGGIO CEMENTATO**
**Abutment dritto**


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,50	STAEX2015
■	2,50	STAEX2025
■	3,50	STAEX2035
■	1,50	STAEX3415
■	2,50	STAEX3425
■	3,50	STAEX3435
■	1,50	STAEX5015
■	2,50	STAEX5025
■	3,50	STAEX5035

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP


**Abutment dritto**


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,50	STEX2015
■	2,50	STEX2025
■	3,50	STEX2035
■	1,50	STEX3415
■	2,50	STEX3425
■	3,50	STEX3435
■	1,50	STEX5015
■	2,50	STEX5025
■	3,50	STEX5035

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP


**Abutment angolato 15°**


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,50	A1EX2015
■	2,50	A2EX2015
■	1,50	A1EX3415
■	2,50	A2EX3415
■	1,50	A1EX5015
■	2,50	A2EX5015

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP


**Abutment angolato 25°**


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,50	A1EX2025
■	2,50	A2EX2025
■	1,50	A1EX3425
■	2,50	A2EX3425
■	1,50	A1EX5025
■	2,50	A2EX5025

Anodizzazione ■ NP ■ RP ■ WP



## Restauri diretti sull'impianto

OVERDENTURE

### Kirator



#### Abutment Kirator

Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,00	LOEX2001
■	2,00	LOEX2002
■	3,00	LOEX2003
■	4,00	LOEX2004
■	5,00	LOEX2005
■	6,00	LOEX2006
■	1,00	LOEX3401
■	2,00	LOEX3402
■	3,00	LOEX3403
■	4,00	LOEX3404
■	5,00	LOEX3405
■	6,00	LOEX3406
■	1,00	LOEX5001
■	2,00	LOEX5002
■	3,00	LOEX5003
■	4,00	LOEX5004

Trattamento superficiale color oro


Chiave di inserimento Rif. LOSD01/LOS02



Include l'abutment Kirator con applicatore sterilizzabile in plastica di poliossimetilene (Tecaform AH-POM-C).

#### Relativi attacchi

##### Transfer da impronta Kirator

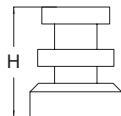


Sistema	Altezza (H)	Riferimento
Kirator	6,50	TCRK3400



Set di 4 unità. NON sterilizzare in autoclave. Accorciabile.


##### Analogo Kirator

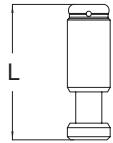

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Kirator	13,00	IATORK01



##### Set di lavorazione Kirator

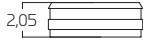

Coppetta in titanio

Sistema	Riferimento
Set di lavorazione Kirator	TP8520

Set di lavorazione Kirator composto da: Coppetta in titanio con cuffia nera di ribassatura, distanziale e tre cuffie in plastica: viola, trasparente e rosa.

Sterilizzare la cuffia metallica in autoclave. Le cuffie in plastica e il disco devono essere disinfezati a freddo. Vedere le istruzioni per la pulizia e la disinfezione sul sito web Ziacom®.

Sistema	Ritenzione (Kg)	Riferimento
Kirator	Morbida/1,20Kg	TPK100
	Standard/1,80Kg	TPK200
	Forte/2,70Kg	TPK300

Set di 4 cuffie di ritenzione in plastica Kirator.



NON autoclavabile, eseguire la disinfezione a freddo. Divergenza massima di 22° tra gli impianti.

##### Set di lavorazione divergente Kirator



Coppetta in titanio

Sistema	Riferimento
Set di lavorazione Kirator	TP8520D

Set di lavorazione divergente Kirator composto da: Coppetta in titanio con cuffia nera di ribassatura, distanziale e tre cuffie in plastica: viola, trasparente e rosa.

Sterilizzare la cuffia metallica in autoclave. Le cuffie in plastica e il disco devono essere disinfezati a freddo. Vedere le istruzioni per la pulizia e la disinfezione sul sito web Ziacom®.

Sistema	Ritenzione (Kg)	Riferimento
Kirator	Morbida/1,20Kg	TPK110
	Standard/1,80Kg	TPK220
	Forte/2,70Kg	TPK330

Set di 4 cuffie di ritenzione in plastica Kirator - Divergenti.



NON autoclavabile, eseguire la disinfezione a freddo. Divergenza massima di 44° tra gli impianti.

##### Sequenza dimostrativa



# ZM-Equator



**Abutment ZM-Equator**

Piattof.	Altezza (H)	Riferimento
■	1,00	ZMEX2001
■	2,00	ZMEX2002
■	3,00	ZMEX2003
■	4,00	ZMEX2004
■	5,00	ZMEX2005
■	6,00	ZMEX2006
■	1,00	ZMEX3401
■	2,00	ZMEX3402
■	3,00	ZMEX3403
■	4,00	ZMEX3404
■	5,00	ZMEX3405
■	6,00	ZMEX3406
■	1,00	ZMEX5001
■	2,00	ZMEX5002
■	3,00	ZMEX5003
■	4,00	ZMEX5004

Trattamento superficiale color oro



Include l'abutment ZM-Equator con applicatore sterilizzabile in plastica di poliossimetilene (Tecaform AH-POM-C).

## Relativi attacchi

### Transfer da impronta ZM-Equator



Sistema	Altezza (H)	Riferimento
ZM-Equator	6,50	TCRK3410



Set di 4 unità. NON sterilizzare in autoclave. Accorciabile.

### Analogo ZM-Equator



Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
ZM-Equator	13,20	IAZM01



### Set di lavorazione ZM-Equator



Sistema	Riferimento
Set di lavorazione ZM-Equator	ZM8520

Set di lavorazione ZM-Equator composto da: Coppetta in titanio con cuffia nera di ribassatura, distanziale e tre cuffie in plastica: viola, trasparente e rosa.

Sterilizzare la cuffia metallica in autoclave. Le cuffie in plastica e il disco devono essere disinfezati a freddo. Vedere le istruzioni per la pulizia e la disinfezione sul sito web Ziacom®.

Sistema	Ritenzione (Kg)	Riferimento
ZM-Equator	Morbida/1,20Kg	TZM100
	Standard/1,80Kg	TZM200
	Forte/2,70Kg	TZM300

Set di 4 cuffie di ritenzione in plastica ZM-Equator



NON autoclavabile, eseguire la disinfezione a freddo. Divergenza massima di 22° tra gli impianti.

### Set di lavorazione divergente ZM-Equator



Sistema	Riferimento
Set di lavorazione ZM-Equator	ZM8520D

Set di lavorazione divergente ZM-Equator composto da: Coppetta in titanio con cuffia nera di ribassatura, distanziale e tre cuffie in plastica: viola, trasparente e rosa.

Sterilizzare la cuffia metallica in autoclave. Le cuffie in plastica e il disco devono essere disinfezati a freddo. Vedere le istruzioni per la pulizia e la disinfezione sul sito web Ziacom®.

Sistema	Ritenzione (Kg)	Riferimento
ZM-Equator	Morbida/1,20Kg	TZM100
	Standard/1,80Kg	TZM200
	Forte/2,70Kg	TZM300

Set di 4 cuffie di ritenzione in plastica ZM-Equator - Divergenti.



NON autoclavabile, eseguire la disinfezione a freddo. Divergenza massima di 44° tra gli impianti.


### Sequenza dimostrativa



# Attacchi

## CAD-CAM DIGITALE

### Scanbody ZiaCam sull'impianto

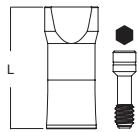

Consultare la bibliografia disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca) per ulteriori informazioni sull'uso delle interfacce nei restauri con zirconio o il manuale della "Procedura protesica" per l'utilizzo degli attacchi.




Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
■	10,00	FNSYEX208T
■	10,00	FNSYEX348T
■	10,00	FNSYEX508T



Indicato per operazioni cliniche e di laboratorio.

Include la vite Rif. LB102000 (NP)/LB103400 (RP/WP) per tutti gli scanbody ZiaCam sull'impianto.

### Ti-Base ZiaCam

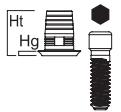

#### Rotante

Piattaf.	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
■	0,50/5,00	FRUEX201
■	1,50/6,00	FRUEX202
■	0,50/5,00	FRUEX341
■	1,50/6,00	FRUEX342
■	0,50/5,00	FRUEX501
■	1,50/6,00	FRUEX502



#### Non rotante

Piattaf.	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
■	0,50/5,00	FNUEX201
■	1,50/6,00	FNUEX202
■	0,50/5,00	FNUEX341
■	1,50/6,00	FNUEX342
■	0,50/5,00	FNUEX501
■	1,50/6,00	FNUEX502



Include la vite speciale Kiran con trattamento superficiale Rif. DSEI2010 (NP)/DSEI3410 (RP/WP) per tutti i Ti-Base ZiaCam.

### Ti-Base ZiaCam Tx30



#### Rotante

Piattaf.	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
■	0,50/6,00	FRUEX20TX1
■	1,50/7,00	FRUEX20TX2
■	0,50/6,00	FRUEX34TX1
■	1,50/7,00	FRUEX34TX2
■	0,50/6,00	FRUEX50TX1
■	1,50/7,00	FRUEX50TX2




#### Non rotante

Piattaf.	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
■	0,50/6,00	FNUEX20TX1
■	1,50/7,00	FNUEX20TX2
■	0,50/6,00	FNUEX34TX1
■	1,50/7,00	FNUEX34TX2
■	0,50/6,00	FNUEX50TX1
■	1,50/7,00	FNUEX50TX2



Include la vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale Rif. DSEI2010TX (NP)/DSEI3410TX (RP/WP) per tutti i Ti-Base ZiaCam Tx30.

### Abutment Kirator.Toolbar

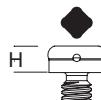

Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
Universale	1,80	LOTB100

Trattamento superficiale color oro.



# Attacchi

Restauri con  
transepiteliali




## Restauri con transepiteliali

### ■ Abutment transepiteliali


- Consentono la formazione e la guarigione del tessuto perimplantare dalle prime 8 settimane.
- Il concetto "one abutment-one time" consente l'adesione gengivale alla sua superficie poiché non sono necessarie disconnessioni ripetute.
- Prevengono la perdita di tessuto osseo e di tessuto molle perché non vi è una rottura meccanica dell'interfaccia perimplantare.
- L'area del lavoro protesico rimane al di sopra del livello gengivale, rendendo più prevedibile il comportamento dell'adesione dei tessuti molli e mantenendo una buona tenuta.
- Minore formazione di micro-gap nella giunzione tra l'impianto e il componente protesico.
- Maggiore conservazione dell'osso crestale.
- Prove di protesi e posizionamento della protesi definitiva senza anestesia.
- Se il torque consigliato viene superato, la vite si frattura nel transepiteliale e non all'interno dell'impianto.

### ■ Altezze degli attacchi

- Una maggiore altezza dell'abutment equivale a una maggiore conservazione dell'osso marginale nelle protesi cementate.
- Gli abutment più alti ( $\geq 2$  mm) consentono un migliore adattamento dei tessuti molli.
- Gli abutment corti ( $< 2$  mm) possono comprimere i tessuti molli con conseguente maggiore perdita ossea a livello crestale.
- La perdita ossea marginale varia a seconda della decisione clinica in merito all'altezza dell'abutment. In genere, per gli abutment protesici  $\geq 2$  mm si avrà una conservazione migliore dell'osso crestale.

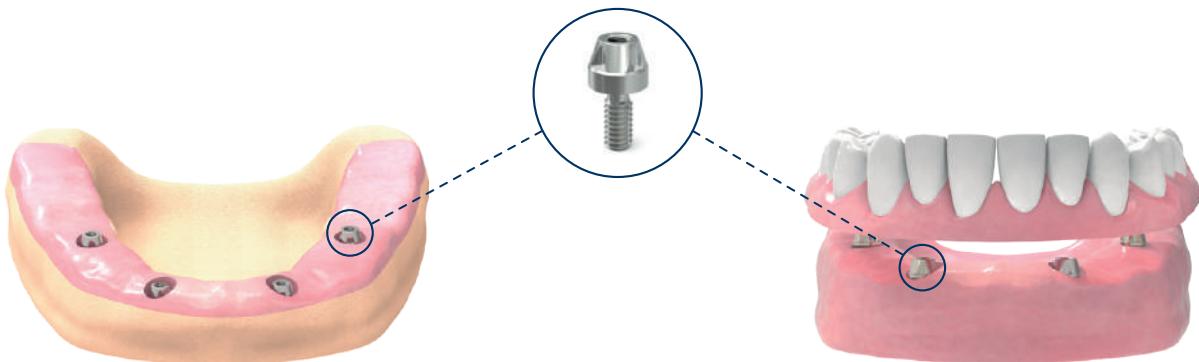

## ■ Basic | Sequenza operativa

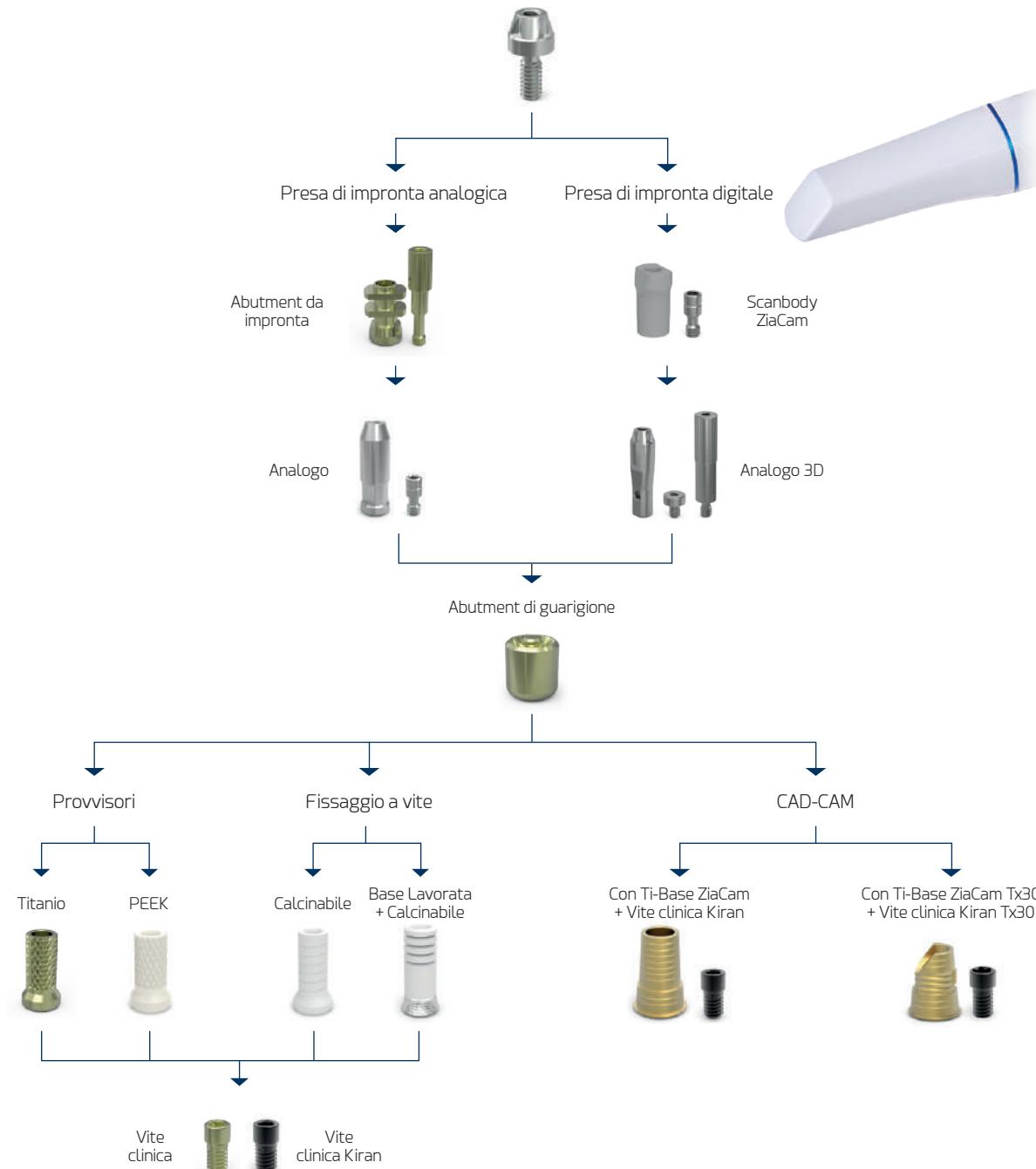

Per ulteriori informazioni sull'uso degli attacchi consultare il "Manuale delle procedure protesiche" disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)



# Attacchi

## Abutment Basic



Piattof.	Altezza (H)	Riferimento
■	2,00	BASIC2002
■	3,00	BASIC2003
■	4,00	BASIC2004
■	5,00	BASIC2005
■■	1,50	BASIC3401
■■	2,00	BASIC3402
■■	3,00	BASIC3403
■■	4,00	BASIC3404
■■	5,00	BASIC3405
■■■	2,00	BASIC5002
■■■	3,00	BASIC5003
■■■	4,00	BASIC5004
■■■	5,00	BASIC5005

Chiave di inserimento Rif. MABA100/MABA110



Include l'abutment Basic con applicatore sterilizzabile in plastica di poliossimetilene (Tecaform AH-POM-C). Angolazione del cono di 18°. Angolazione tra gli abutment di 36°.

## Abutment di guarigione Basic




Sistema	Altezza (H)	Riferimento
Basic	5,00	BAHAEX34

Anodizzazione ■



## Abutment da impronta Basic

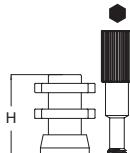

Sistema	Altezza (H)	Riferimento
Basic	8,00	BATC134

Anodizzazione ■



Vite inclusa per tutti gli abutment da impronta Basic.


## Analogo Basic



Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	13,00	BAIAEX34




## Analogo Basic 3D - Singolo

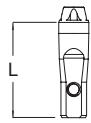

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	13,00	BAIA348D



## Analogo Basic 3D - Set

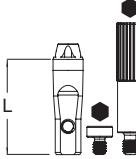


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	13,00	BAIA348DC*



\* Include la vite di base Rif. DSIADI e la vite laterale Rif. DSIADT per la connessione dell'analogo.

## Viti - Analogo 3D

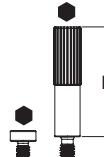

Tipo	Lunghezza (L)	Riferimento
Vite di base (1)*	-	DSIADI
Vite laterale (2)*	15,00	DSIADT



\* Set di 4 unità.

**Vite clinica Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	4,30	BDSEI3400

Anodizzazione ■


**Vite clinica Kiran Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	4,30	BDSEI3410



Vite speciale Kiran con trattamento superficiale.

**Vite da laboratorio Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	5,50	BDSEI3401




Vite NON adatta per l'uso come vite clinica definitiva.

**Vite clinica Kiran Tx30 Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	4,10	BDSEI34TX




Vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale.

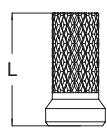
**Abutment provvisorio Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	8,50	BARUT10


Anodizzazione ■

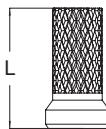
**Abutment provvisorio Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	8,50	BARUP34

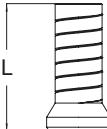
**UCLA Basic**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	9,00	BARUEX34

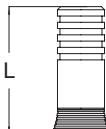
**Abutment base lavorata Basic + Abutment calcinabile**

**Rotante**

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	11,00	BBRU34



Basic

# Attacchi

## CAD-CAM DIGITALE

### Scanbody ZiaCam su abutment Basic



Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	8,70	FNSYB18T



Indicato per operazioni cliniche e di laboratorio.

Include la vite Rif. BDSEI3401 per tutti gli Scanbody ZiaCam su abutment Basic.

### Ti-Base ZiaCam su Basic



Sistema	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
Basic	0,30/6,70	BFRU341



Include la vite speciale Kiran con trattamento superficiale Rif. BDSEI3410 per tutti i Ti-Base ZiaCam su Basic.

### Ti-Base ZiaCam Tx30 su Basic




Sistema	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
Basic	0,30/5,70	BFRU341TX



Include la vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale Rif. BDSEI3410 per tutti i Ti-Base ZiaCam Tx30 su Basic.

# Restauri con transepiteliali

## ■ XDrive | Sequenza operativa

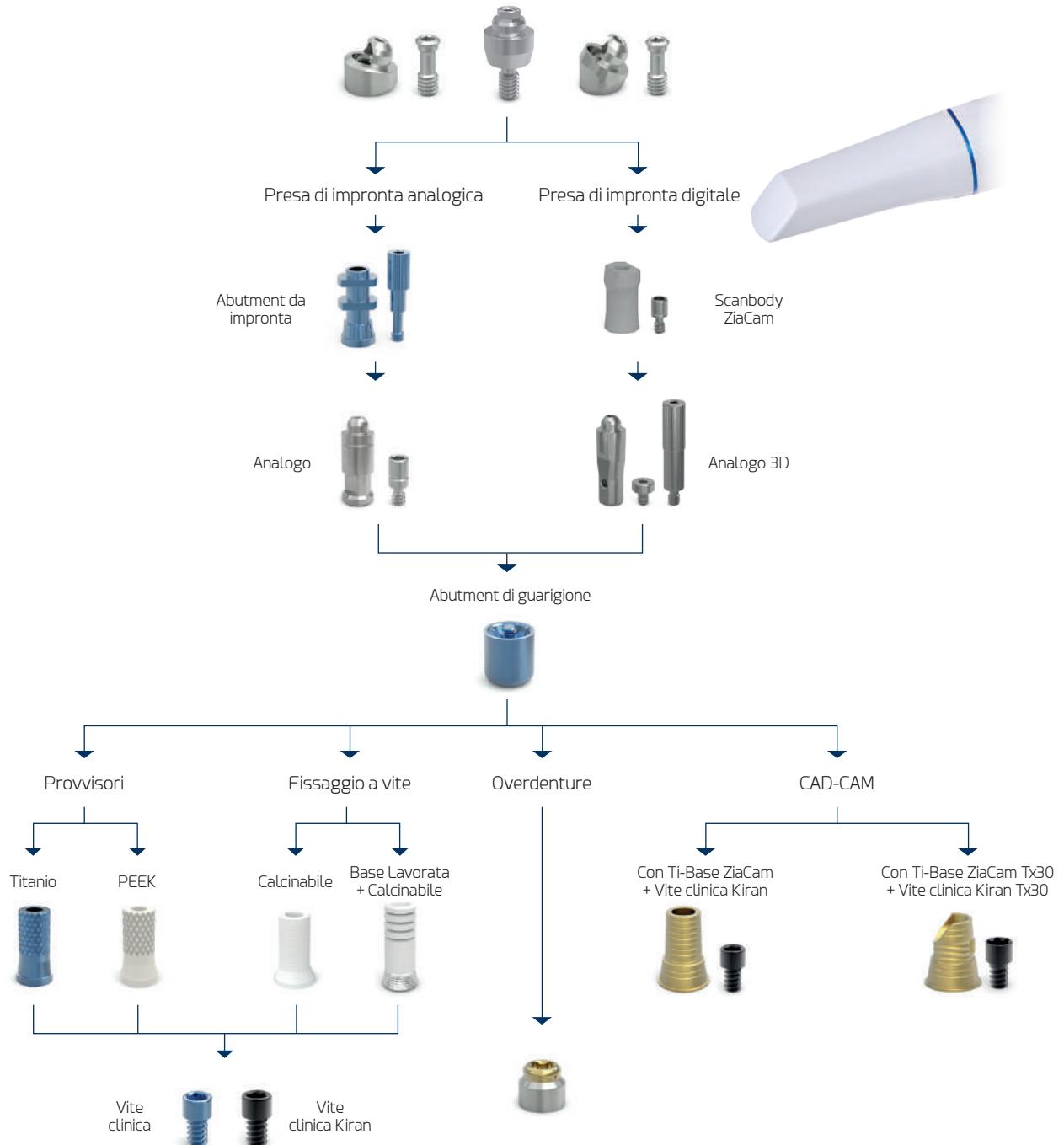


Per ulteriori informazioni sull'uso degli attacchi consultare il "Manuale delle procedure protesiche" disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)



# Attacchi

## Abutment dritto XDrive

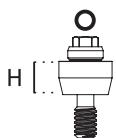

Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■■■■■	1,00	XST103410
■■■■■	2,00	XST103420
■■■■■	3,00	XST103430
■■■■■	4,00	XST103440
■■■■■	5,00	XST103450

Chiave di inserimento Rif. MABA200/MABA210




Includere l'abutment XDrive con applicatore sterilizzabile in plastica di poliossimetilene (Tecaform AH-POM-C).

Angolazione del cono di 21°. Angolazione tra gli abutment di 42°.



Abutment XDrive con applicatore

## Abutment angolato 17° XDrive

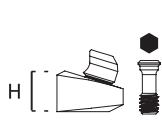


Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■■■■■	2,00	XA2103417
■■■■■	3,00	XA3103417
■■■■■	4,00	XA4103417
■■■■■	5,00	XA5103417



Includere posizionatore metallico in titanio e vite per tutti gli abutment angolati XDrive.


## Abutment angolato 30° XDrive

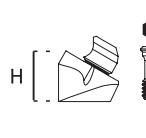

Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■■■■■	3,00	XA3103430
■■■■■	4,00	XA4103430
■■■■■	5,00	XA5103430



## Abutment di guarigione XDrive

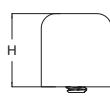


Sistema	Altezza (H)	Riferimento
XDrive	5,00	XH103400

Anodizzazione ■■■■■



## Abutment da impronta XDrive

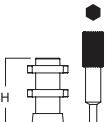


Sistema	Altezza (H)	Riferimento
XDrive	10,50	XT103411

Anodizzazione ■■■■■



Vite inclusa.


## Analogo XDrive

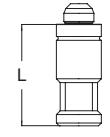

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	13,00	XIA103400



## Analogo XDrive 3D - Singolo

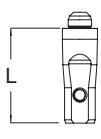

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	13,00	XIA3408D



## Analogo XDrive 3D - Set




Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	13,00	XIA3408DC*



\* Include la vite di base Rif. DSIADI e la vite laterale Rif. DSIADT per la connessione dell'analogo.

## Viti - Analog 3D

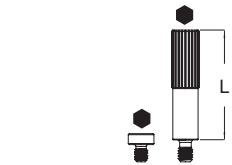


Tipo	Lunghezza (L)	Riferimento
Vite di base (1)*	-	DSIADI
Vite laterale (2)*	15,00	DSIADT




\* Set di 4 unità.

### Vite clinica XDrive

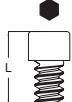

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	3,50	XDS103410
Anodizzazione ■		

### Vite clinica Kiran XDrive

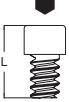

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	3,50	XDS103411

Vite speciale Kiran con trattamento superficiale.

### Vite da laboratorio XDrive



Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	5,10	XLB103410

Vite NON adatta per l'uso come vite clinica definitiva.

### Vite clinica Kiran Tx30 XDrive




#### Per Ti-Base ZiaCam o struttura metallica

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	3,50	XDS3411TX


Vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale.

### Abutment provvisorio XDrive

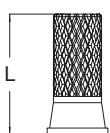

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	9,50	XST3410
Anodizzazione ■		


### Abutment provvisorio XDrive

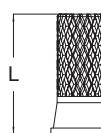

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	9,50	XSP3410




### UCLA XDrive

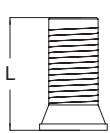


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	8,00	XRU103400

### Abutment base lavorata XDrive + Abutment calcinabile

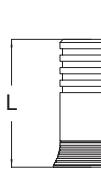

Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	11,00	XBRU34

### Abutment Kirator XDrive

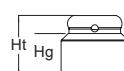


Sistema	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
XDrive	3,00/4,30	XLO3400
Abutment Kirator con trattamento superficiale oro.		

# Attacchi

## CAD-CAM DIGITALE

### Scanbody ZiaCam su abutment XDrive

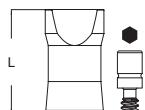


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	8,70	FNSYX18T



Indicato per operazioni cliniche e di laboratorio.

Include la vite Rif. XLB103410 per tutti gli Scanbody ZiaCam su abutment XDrive.

### Ti-Base ZiaCam XDrive

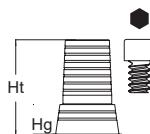


Sistema	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
XDrive	0,15/6,70	XFRU341



Include la vite speciale Kiran con trattamento superficiale Rif. XDS103411.

### Ti-Base ZiaCam Tx30 XDrive

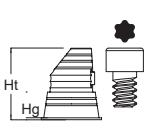

Sistema	Altezza (Hg/Ht)	Riferimento
XDrive	0,15/5,70	XFRU341TX



Include la vite speciale Kiran Tx30 con trattamento superficiale Rif. XDS3411TX.

## ■ Tabella delle coppie per gli attacchi

Elemento/Attacco	Strumento/Utensile	Torque
Viti di fissaggio/Abutment di guarigione	Cacciavite esagonale 1,25 mm	Manuale
Viti per abutment da impronta	Cacciavite esagonale 1,25 mm	Manuale
Viti da laboratorio	Cacciavite esagonale 1,25 mm	Manuale
Viti cliniche direttamente sull'impianto	Cacciavite esagonale 1,25 mm	30 Ncm
Viti cliniche Kiran direttamente sull'impianto	Cacciavite esagonale 1,25 mm	30 Ncm
Abutment Nature	Chiavi di inserimento: MANA100/MANA110/MANA120	30 Ncm
Viti cliniche su Nature	Cacciavite esagonale 1,25 mm	30 Ncm
Viti cliniche Kiran su Nature	Cacciavite esagonale 1,25 mm	30 Ncm
Abutment Basic	Chiavi di inserimento: MABA100/MABA110/MABA120	30 Ncm
Abutment XDrive	Chiavi di inserimento: MABA200/MABA210/MABA220	30 Ncm
Viti cliniche su Basic	Cacciavite esagonale 1,25 mm	25 Ncm
Viti cliniche Kiran su Basic	Cacciavite esagonale 1,25 mm	25 Ncm
Viti cliniche su XDrive	Cacciavite esagonale 1,25 mm	20 Ncm
Viti cliniche Kiran su XDrive	Cacciavite esagonale 1,25 mm	20 Ncm
Scanbody ZiaCam + Vite	Cacciavite esagonale 1,25 mm	Manuale
Abutment Kirator	Chiavi di inserimento: LOSD01/LOSD02	30 Ncm
Abutment/Vite Tx30 (Rotazione Variabile)	Cacciavite Torx. Tx30	30 Ncm


### ATTENZIONE

Il superamento del torque di serraggio consigliato per viti e abutment può compromettere il restauro protesico e danneggiare la struttura dell'impianto.




Per il carico immediato: NON serrare manualmente, fissare al torque finale.  
Quando si utilizza un cacciavite o un adattatore per contrangolo (CA), non superare la velocità massima di 25 giri/min.

# Strumenti chirurgici

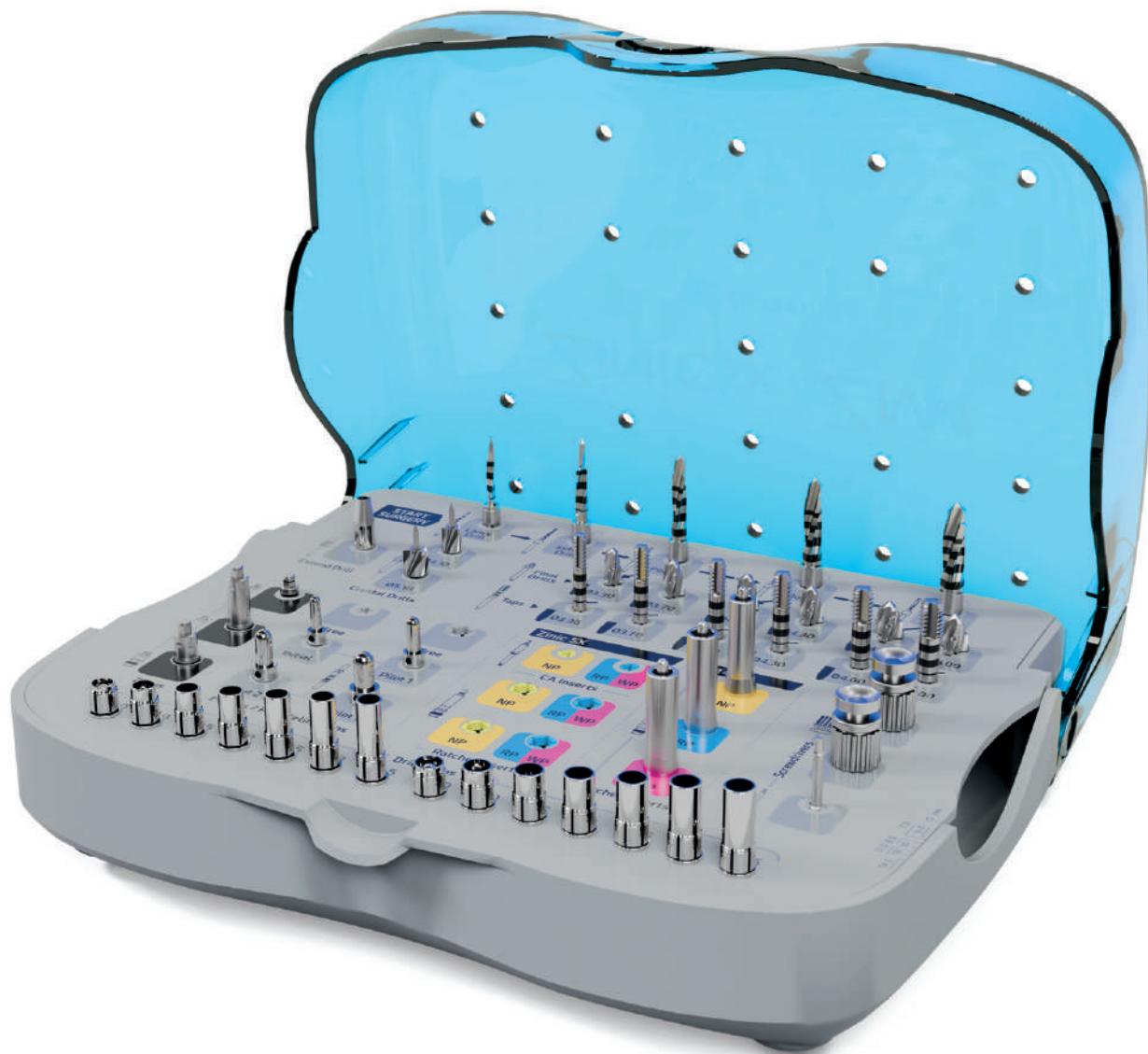

# Strumenti chirurgici

## Scatola chirurgica Zinic® SX - ZM4

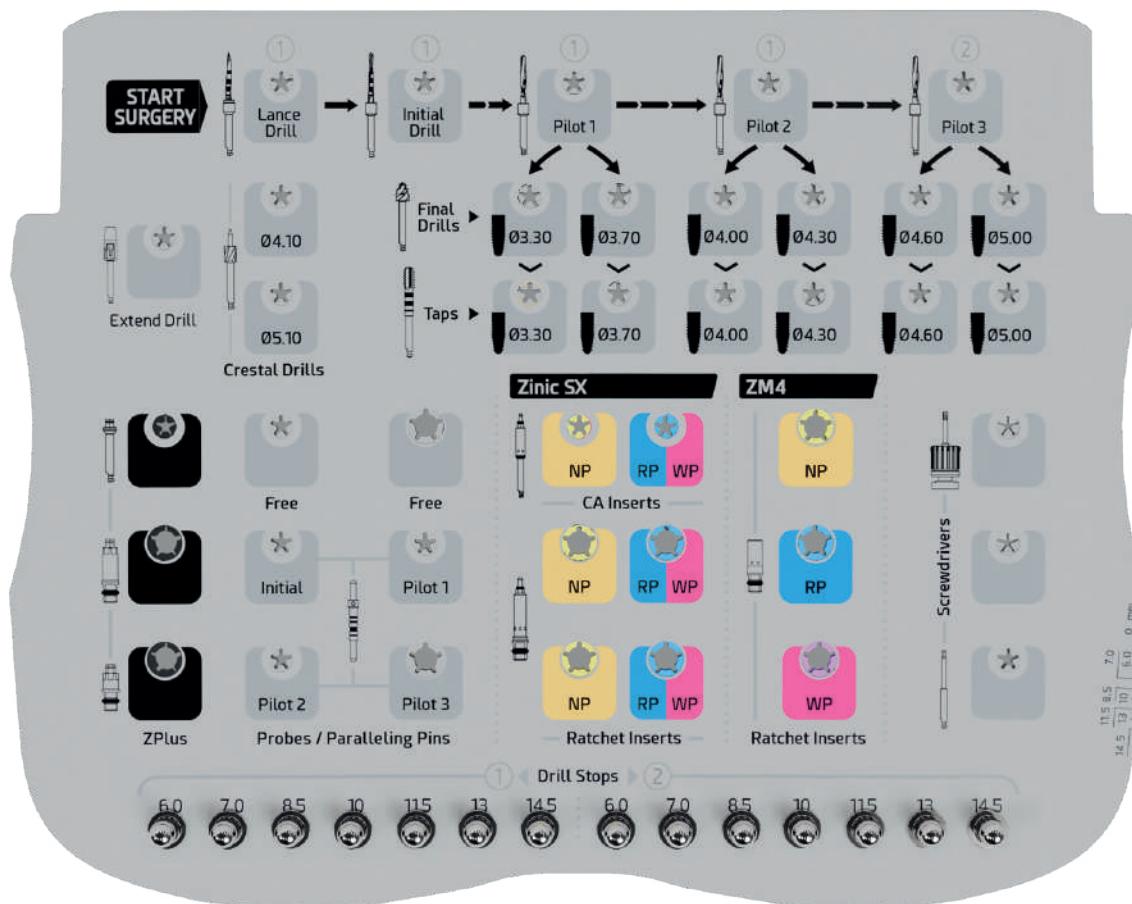

■ Scatole disponibili Zinic® SX - ZM4

Piattof.	Contenuto	Riferimento
	Vuota	BOX850U
	Completa	BOX850UC



Materiale: Radel.

Per evitare danni, assicurarsi che la scatola non tocchi le pareti dell'autoclave.




■ Contenuto delle scatole chirurgiche

RIF	Descrizione	BOX50UC
<b>SID001M</b>	Fresa Lancia. Ø2,00 mm. Millimetrata.	●
<b>OTD00PSX</b>	Fresa Pilota Iniziale. Millimetrata.	●
<b>OTD10PSX</b>	Fresa Pilota. P1. Millimetrata.	●
<b>OTD20PSX</b>	Fresa Pilota. P2. Millimetrata.	●
<b>OTD30PSX</b>	Fresa Pilota. P3. Millimetrata.	●
<b>OTD33SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F1	●
<b>OTD37SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F2	●
<b>OTD40SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F3	●
<b>OTD43SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F4	●
<b>OTD46SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F5	●
<b>OTD50SX</b>	Fresa Chirurgica Finale. F6	●
<b>CLD34</b>	Fresa Chirurgica Crestale. Ø4,10 mm.	●
<b>CLD50</b>	Fresa Chirurgica Crestale. Ø5,10 mm.	●
<b>ZMPD160</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H6 mm.	●
<b>ZMPD170</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H7 mm.	●
<b>ZMPD185</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H8,5 mm.	●
<b>ZMPD110</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H10 mm.	●
<b>ZMPD115</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H11,5 mm.	●
<b>ZMPD113</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H13 mm.	●
<b>ZMPD114</b>	Stop per Fresa Calibrato. 1. H14,5 mm.	●
<b>ZMPD260</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H6 mm.	●
<b>ZMPD270</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H7 mm.	●
<b>ZMPD285</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H8,5 mm.	●
<b>ZMPD210</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H10 mm.	●
<b>ZMPD215</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H11,5 mm.	●
<b>ZMPD213</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H13 mm.	●
<b>ZMPD214</b>	Stop per Fresa Calibrato. 2. H14,5 mm.	●
<b>MTAPST33</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø3,30 mm. Millimetrata.	●
<b>MTAPST37</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø3,70 mm. Millimetrata.	●
<b>MTAPST40</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø4,00 mm. Millimetrata.	●
<b>MTAPST42</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø4,30 mm. Millimetrata.	●
<b>MTAPST46</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø4,60 mm. Millimetrata.	●
<b>MTAPST50</b>	Maschiatore Chirurgico. Ø5,00 mm. Millimetrata.	●
<b>DEXT10</b>	Prolunga per Frese	●
<b>01MOHW</b>	Chiave di bloccaggio ZPlus.	●
<b>MUR101</b>	Sonda/Parallelizzatore. Iniziale. Millimetrata.	●
<b>MUR201</b>	Sonda/Parallelizzatore. P1. Millimetrata.	●
<b>MUR301</b>	Sonda/Parallelizzatore. P2. Millimetrata.	●
<b>MUR401</b>	Sonda/Parallelizzatore. P3. Millimetrata.	●
<b>01MMIN</b>	Chiave di inserimento ZPlus. Corta.	●
<b>TLMIN</b>	Chiave di inserimento ZPlus. Lunga.	●
<b>TSMIN</b>	Chiave di inserimento ZPlus. Corta.	●
<b>MESD</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Lunga.	●
<b>SMSD</b>	Cacciavite Chirurgico. 1,25 mm. Corto.	●
<b>LMSD</b>	Cacciavite Chirurgico. 1,25 mm. Lungo.	●
<b>TORK50</b>	Chiave Dinamometrica Regolabile.	●

# Strumenti chirurgici

## FRESE CHIRURGICHE

### Fresa lancia

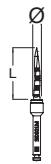

Piattaf.	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Riferimento
[Yellow] [Blue] [Pink]	2,00	16,30	SID001M

Millimetraggio: 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



### Fresa pilota iniziale



Piattaf.	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Riferimento
[Yellow] [Blue] [Pink]	1,80/2,50	17,50	OTD00PSX

Millimetraggio: 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



### Fresa pilota




Piattaf.	Tipo	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Riferimento
[Yellow]	Pilota 1	2,90/3,10	17,50	OTD10PSX
[Blue]	Pilota 2	3,35/3,70	17,50	OTD20PSX
[Pink]	Pilota 3	4,37/3,90	17,50	OTD30PSX

Millimetraggio: 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



### Fresa finale

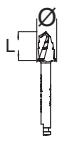

Piattaf.	Tipo	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Riferimento
[Yellow]	Finale 1	3,40	6,50	OTD33SX
[Blue]	Finale 2	4,10	6,50	OTD37SX
[Pink]	Finale 3	4,10	6,50	OTD40SX
[Yellow]	Finale 4	4,10	6,50	OTD43SX
[Blue]	Finale 5	5,10	6,50	OTD46SX
[Pink]	Finale 6	5,10	6,50	OTD50SX



### Fresa chirurgica crestale



Piattaf.	Diametro (Ø)	Riferimento
Universale	4,10	CLD34
	5,10	CLD50



**STOP**
**Stop per fresa calibrato**


Piattaf.	Tipo	Lunghezza (L) Impianto	Riferimento
■	1	6,00	ZMPD160
		7,00	ZMPD170
		8,50	ZMPD185
		10,00	ZMPD110
		11,50	ZMPD115
		13,00	ZMPD113
		14,50	ZMPD114
	2	6,00	ZMPD260
		7,00	ZMPD270
		8,50	ZMPD285
		10,00	ZMPD210
		11,50	ZMPD215
		13,00	ZMPD213
		14,50	ZMPD214
Set *	--	--	KZMPD100

\* Set completo di 14 stop calibrati.


**MASCHIATORI**
**Maschiatore chirurgico. CA/Manuale**


Piattaf.	Diametro (Ø)	Riferimento
■	3,30	MTAPST33
■	3,70	MTAPST37
■	4,00	MTAPST40
■	4,30	MTAPST42
■	4,60	MTAPST46
■	5,00	MTAPST50

Millimetrato: 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



Per ulteriori informazioni sull'uso del maschiatore, vedere il protocollo chirurgico.

**SONDE**
**Sonda/Parallelizzatore**


Piattaf.	Tipo	Diametri (Ø1-Ø2)	Lunghezza (L)	Riferimento
■	Iniziale	1,80/2,50	27,00	MUR101
■	Pilota 1	2,70/3,00	27,00	MUR201
■	Pilota 2	3,05/3,60	27,00	MUR301
■	Pilota 3	3,70/4,35	27,00	MUR401

Millimetrato: 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5




ZM4

# Strumentario chirurgico

## CHIAVI

### Chiave di inserimento ZPlus. Chiave dinamometrica

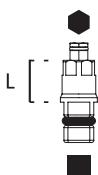

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
ZPlus	3,10/Mini	XSMIN *
	5,60/Corta	TSMIN
	10,60/Lunga	TLMIN

● Esagonale 2,4 mm / ■ Quadrato 4x4 mm



\* IL Rif. XSMIN NON è incluso nella scatola chirurgica.

### Chiave di inserimento ZPlus. CA



Piattaf. Lunghezza (L) Riferimento

ZPlus	15,90	01MMIN *
	23,90	02MMIN

● Esagonale 2,4 mm



\* I Rif. 02MMIN NON è incluso nella scatola chirurgica.

### Chiave di inserimento ZM4. Chiave dinamometrica



Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
	15,00	SMEX20 *
	15,00	SMEX34 *
	15,00	SMEX50 *

● Esagonale NP 2,30 mm

● Esagonale RP 2,70 mm


● Esagonale WP 3,00 mm

■ Quadrato 4x4 mm



\* I Rif. SMEX20/SMEX34/SMEX50 NON sono inclusi nella scatola chirurgica.

### Chiave di inserimento ZM4. CA

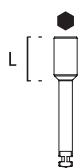

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
■	7,50	MMEX20 *
■	7,50	MMEX34 *
■	7,50	MMEX50 *

● Esagonale NP 2,30 mm


● Esagonale RP 2,70 mm

● Esagonale WP 3,00 mm



\* I Rif. MMEX20/MMEX34/MMEX50 NON sono inclusi nella scatola chirurgica.

### Prolunga per frese

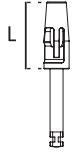

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	12,00	DEXT10



## CACCIAVITI

### Punta per cacciavite. CA




Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	20,00/Corta	MESD01*
	25,00/Lunga	MESD

\* Esagonale 1,25 mm



\* Il Rif. MESD01 NON è incluso nella scatola chirurgica.

### Cacciavite chirurgico. Manuale

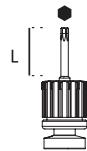


Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	2,80/Mini	XSMSD *
	9,50/Corto	SMSD
	14,50/Lungo	LMSD
	27,00/Extra lungo	XLMSD *

\* Esagonale 1,25 mm



\* I Rif. XSMSD/XLMSD NON sono inclusi nella scatola chirurgica.

### Chiave di bloccaggio ZPlus

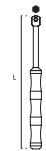

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
ZPlus	90,00	01MOHW

\* Esagonale 2,4 mm



## CHIAVI DINAMOMETRICHE

### Chiave dinamometrica regolabile



Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	86,80	TORK50

\* Quadrato 4x4 mm




# Strumenti chirurgici

## Strumenti complementari

### ADATTATORI

#### Prolunga per chiave dinamometrica

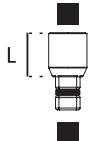


Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	7,20	LAEX

■ Quadrato 4x4 mm



NON incluso nella scatola chirurgica.

#### Adattatore da chiave dinamometrica a contrangolo (CA)

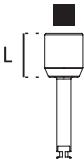

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	7,20	MAEX


■ Quadrato 4x4 mm



NON incluso nella scatola chirurgica.

### MOUNT PER IMPIANTI

#### Mount extra lungo

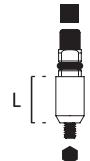

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
■	10,10/Extra lungo	MOUNT20
■	10,10/Extra lungo	MOUNT34

■ Esagonale NP 2,30 mm

■ Esagonale RP 2,70 mm

■ Quadrato 4x4 mm



NON incluso nella scatola chirurgica.

### KIT PER TEST DI LABORATORIO

#### Kit per test di laboratorio



Piattaf.	Altezza (H)	Riferimento
■	3,65	EXLAB20
■	3,65	EXLAB34


■ ROT  
■ Titano Grado 5 EU

Questo prodotto non sostituisce il controllo della pianificazione dei casi clinici.

NON incluso nella scatola chirurgica.

### MODELLO RADIOGRAFICO

#### Modello radiografico ZM4

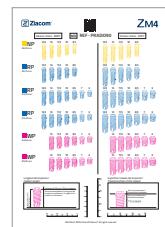

Piattaf.	Modello	Riferimento
■ ■ ■	ZM4	PRADIO90

Scale 1:1 e 1:1,25

Materiale: acetato trasparente. Elemento non sterilizzabile.

Vedere la bibliografia disponibile alla pagina [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)




Strumenti  
protesici



# Strumenti protesici

## Scatola protesica

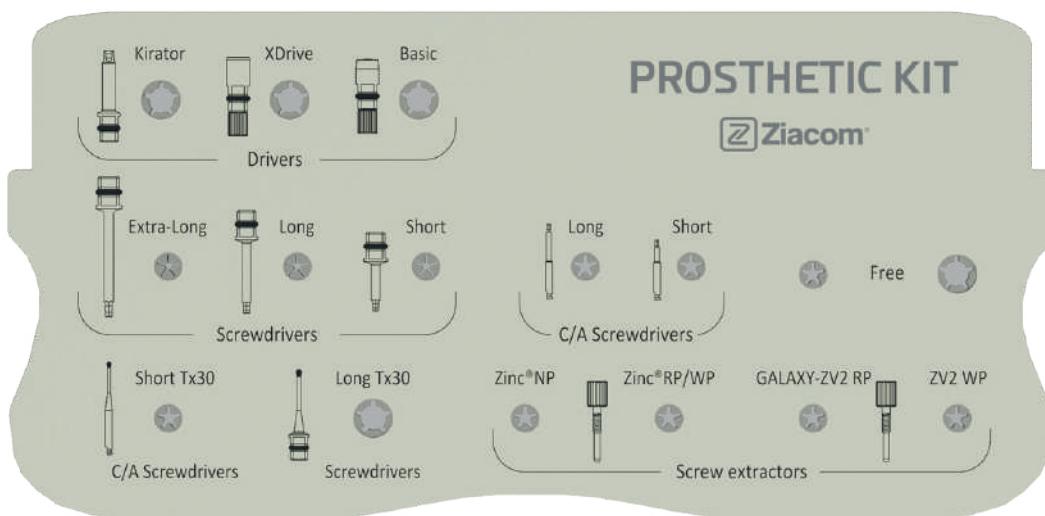

### ■ Scatole protesiche disponibili

Contenuto	Riferimento
Vuota	BOXPN
Di base	BOXPSN
Completa	BOXPCN



Materiale: Radel.


Per evitare danni, assicurarsi che la scatola non tocchi le pareti dell'autoclave.

### ■ Contenuto delle scatole protesiche

RIF	Descrizione	BOXPSN	BOXPCN
<b>LOSD01</b>	Chiave di inserimento Kirator.	●	●
<b>MABA100</b>	Chiave di inserimento Basic. Corta.	●	●
<b>MABA200</b>	Chiave di inserimento XDrive. Corta.	●	●
<b>MADW10</b>	Impugnatura Cacciavite. 4x4.	●	●
<b>SMSD1</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Corta.	●	●
<b>LMSD1</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Lunga.	●	●
<b>XLMSD1</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Extra lunga.		●
<b>MESD</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Lunga.	●	●
<b>MESD01</b>	Punta per Cacciavite. 1,25 mm. Corta.	●	●
<b>MESDTX</b>	Punta per Cacciavite Tx30. Lunga.	●	●
<b>LMSD1TX</b>	Punta per Cacciavite Tx30. Lunga.	●	●
<b>EDSZ20 *</b>	Vite Estrattore ZPlus. NP.		●
<b>EDSZ34 *</b>	Vite Estrattore ZPlus. RP/WP.		●
<b>EDSG34 *</b>	Vite Estrattore Abutment. RP		●
<b>EDSG50 *</b>	Vite Estrattore Abutment. WP.		●
<b>TORK50</b>	Chiave Dinamometrica Regolabile.	●	●

\* Prodotto non incluso nel sistema ZM4.

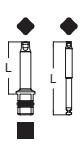

**CHIAVI**
**Chiave di inserimento Kirator**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Kirator	13,60/Chiave dinamometrica/Manuale 20,00/CA	LOSD01 LOSD02*

◆ Quadrato 2,11 mm / ■ Quadrato 4x4 mm



\* Il Rif. LOSD02 NON è incluso nella scatola protesica.


**Chiave di inserimento Basic.  
Chiave dinamometrica**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	5,00/Corta 13,00/Lunga	MABA100 MABA110*

◆ Basic / ■ Quadrato 4x4 mm



\* Il Rif. MABA110 NON è incluso nella scatola protesica.

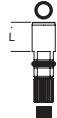**Chiave di inserimento XDrive.  
Chiave dinamometrica**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	6,00/Corta 13,00/Lunga	MABA200 MABA210*

○ XDrive / ■ Quadrato 4x4 mm



\* Il Rif. MABA210 NON è incluso nella scatola protesica.

**Chiave di inserimento Nature.  
Chiave dinamometrica**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Nature	5,00/Corta 15,00/Lunga	MANA100* MANA110*

■ Nature / ■ Quadrato 4x4 mm



\* I Rif. MANA100/MANA110 NON sono inclusi nella scatola protesica.


**Chiave di inserimento Nature. CA**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Nature	20,50	MANA120*

◆ Nature



\* Il Rif. MANA120 NON è incluso nella scatola protesica.

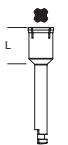**Chiave di inserimento Basic. CA**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
Basic	7,00	MABA120*

◆ Basic



\* Il Rif. MABA120 NON è incluso nella scatola protesica.

**Chiave di inserimento XDrive. CA**


Sistema	Lunghezza (L)	Riferimento
XDrive	7,00	MABA220*

○ XDrive



\* Il Rif. MABA220 NON è incluso nella scatola protesica.

# Strumenti protesici

## CACCIAVITI

### Impugnatura cacciavite

Piattaf. Universale	Lunghezza (L) 12,90	Riferimento MADW10
■ Quadrato 4x4 mm		

### Punta per cacciavite. Chiave dinamometrica

Piattaf. Universale	Lunghezza (L) 9,50/Corta	Riferimento SMSD1
■ Quadrato 4x4 mm	14,50/Lunga	LMSD1
■ Quadrato 4x4 mm	27,00/Extra lunga	XLMSD1

### Punta per cacciavite. CA

Piattaf. Universale	Lunghezza (L) 20,00/Corta	Riferimento MESD01
■ Quadrato 4x4 mm	25,00/Lunga	MESD

### Punta per cacciavite Tx30. CA

Sistema Tx30	Lunghezza (L) 26,00/Corta	Riferimento MESD01TX *
■ Quadrato 4x4 mm	32,00/Lunga	MESDTX

### Punta per cacciavite Tx30. Chiave dinamometrica

Sistema Tx30	Lunghezza (L) 12,00/Corta	Riferimento SMSD1TX *
■ Quadrato 4x4 mm	18,00/Lunga	LMSD1TX

### Cacciavite protesico Tx30. Manuale

Sistema Tx30	Lunghezza (L) 12,00/Corto	Riferimento SMSDTX *
■ Quadrato 4x4 mm	18,00/Lungo	LMSDTX *

Non superare i 30 Ncm poiché si potrebbero danneggiare gravemente sia il cacciavite che la vite.

\* Il Rif. SMSDTX NON è incluso nella scatola protesica.

## VITE ESTRATTORE

### Vite estrattore ZPlus

Piattaf. ■ NP	Lunghezza (L) 25,00	Riferimento EDSZ20 *
■ WP	23,70	EDSZ34 *
Anodizzazione ■ NP ■ RP/WP		

■ M1,60	■ M1,80

### Vite estrattore abutment Galaxy/ZV2

Piattaf. ■ RP	Lunghezza (L) 25,00	Riferimento EDSG34 *
■ WP	26,80	EDSG50 *
Anodizzazione ■ RP ■ WP		

\* Prodotto non incluso nel sistema ZM4.

## CHIAVI DINAMOMETRICHE

### Chiave dinamometrica regolabile

Piattaf. ■ Quadrato 4x4 mm	Lunghezza (L) 86,80	Riferimento TORK50

## Strumenti complementari

### Adattatore da contrangolo (CA) a chiave dinamometrica



Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Universale	12,00	MC10Z

■ Quadrato 4x4 mm



NON incluso nella scatola protesica.

### Impugnatura inseritore ritenzioni + Estrattore




Piattaf.	A Lunghezza (L)	B Lunghezza (L)	Riferimento
Kirator ZM-Equator	81,50	110,40	MBEI3610



NON incluso nella scatola protesica.

### Inseritore di ritenzioni

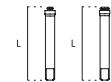

Piattaf.	Lunghezza (L)	Riferimento
Kirator	32,00	MBEI3602
ZM-Equator	32,00	MBEI3603



Inseritori per cuffie in plastica Kirator / ZM-Equator.


NON incluso nella scatola protesica.

### Anelli di ritenzione per strumenti



Piattaf.	Misura	Riferimento
Universale	2x1	RREI0030

Set di 10 unità.

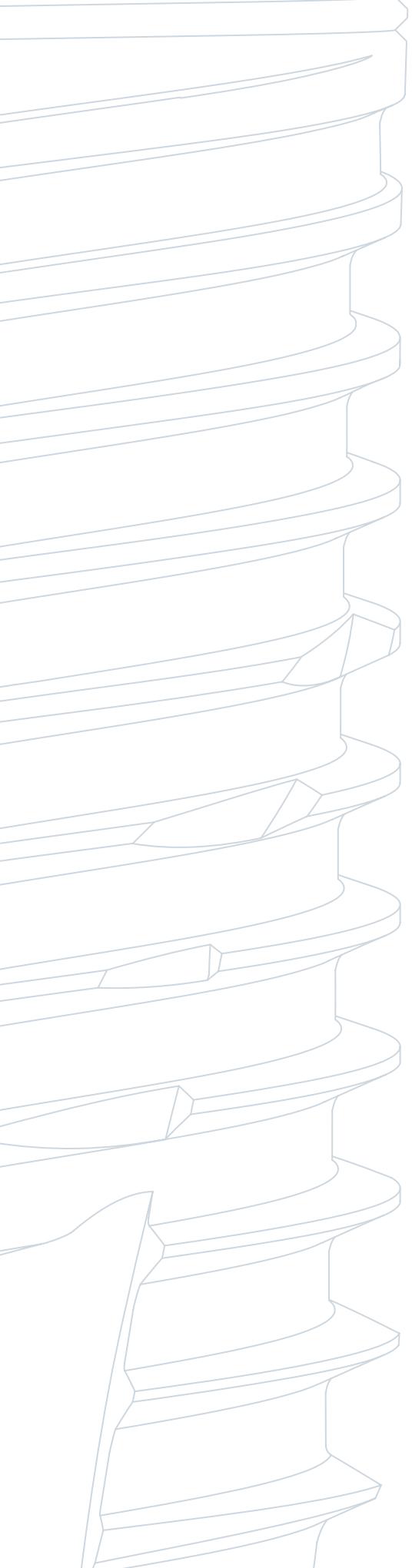

ZM4

Protocollo  
chirurgico




# Protocollo chirurgico

## Caratteristiche del sistema di fresatura ZM4

### ■ Sistema di frese Ziacom®

Le fresa per i sistemi di impianti Ziacom® sono realizzate in acciaio inox. La marcatura laser sullo stelo delle fresa ne identifica il diametro maggiore/minore e la lunghezza; inoltre, le tacche di misurazione marcate laser rappresentano le diverse lunghezze degli impianti (fresa millimetrica). La punta della fresa è lunga 0,5 mm e non è inclusa nelle misurazioni delle diverse marcature laser.

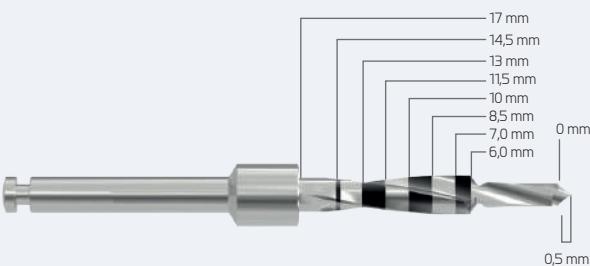

### ■ Frese Finali Ziacom®


Il loro utilizzo è essenziale e obbligatorio per ottenere una fresatura finale ideale a ricevere l'impianto con un inserimento delicato, sicuro e preciso. In questo modo si eviterà di applicare un torque eccessivo all'impianto per inserirlo nella posizione finale.

#### ■ STOP DELLA FRESA FINALE

Nel design delle fresa finali è stato incorporato, tra l'area attiva e lo stelo, uno stop composto da tre lame (vedere le aree rosse contrassegnate nell'immagine) che limitano l'avanzamento della fresa.

#### IMPORTANTE

Prestare attenzione a non superare la fresatura dello stop, che modificherebbe l'anatomia coronale del sito chirurgico.

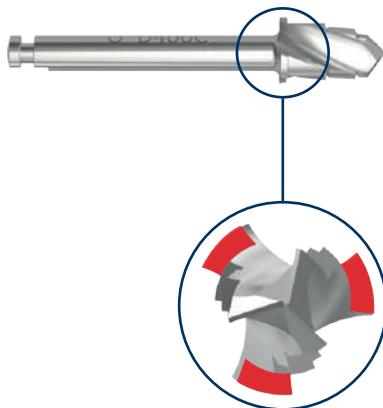

#### ■ GARANZIA DI EFFICIENZA DELLE FRESE ZIACOM®


Le fresa chirurgiche per impianti ZM4 di Ziacom® (**fresa corticale, fresa lancia, fresa iniziale, fresa pilota e fresa finali**) hanno una vita prevista pari a un numero massimo di 60 utilizzi. Si consiglia di monitorare costantemente le condizioni di taglio, soprattutto quando si raggiunge il numero di fresature compreso tra 41 e 50, poiché dopo 50 utilizzi è necessario prendere in considerazione di cambiare le fresa prima di raggiungere i 60.

Tenere presente che, a seconda delle dimensioni dell'impianto, della densità ossea e del relativo protocollo chirurgico, le varie fresa vengono utilizzate diversamente; si consiglia di controllare il numero di utilizzi per ciascuno strumento.

<b>1</b> USI	→	<b>40</b> USI	USO EFFICIENTE
<b>41</b> USI	→	<b>50</b> USI	MONITORAGGIO DEL TAGLIO
<b>51</b> USI	→	<b>60</b> USI	CONSIDERARE DI CAMBIARE
<b>60</b> MAX	→		VITA PREVISTA - NUMERO MASSIMO DI UTILIZZI


## ■ Maschiatori Ziacom®

Sono disponibili maschiatori per contrangolo. La marcatura laser sullo stelo dei maschiatori ne identifica il diametro e la fascia orizzontale della marcatura laser nella parte attiva rappresenta le diverse lunghezze.

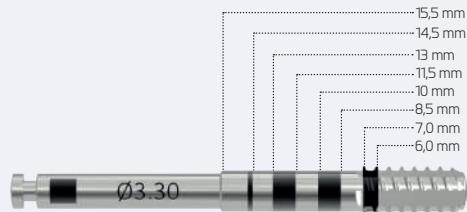

## ■ Sonda

Verificare la profondità del sito chirurgico, in particolare se non si utilizzano stop per frese. Per verificare l'asse del sito chirurgico, i parallelizzatori hanno diametri differentiati in base alla sequenza di fresatura.

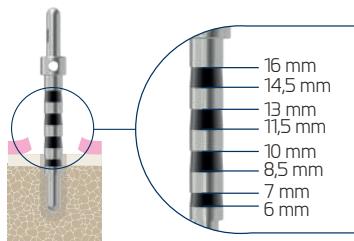

## ■ Chiavi di inserimento corte e lunghe per chiave dinamometrica e contrangolo

Le chiavi di inserimento per contrangolo o per chiave dinamometrica sono progettate per trasportare l'impianto dalla boccetta No Mount al sito chirurgico per procedere all'inserimento.



## ■ Stop per frese


Si tratta di un accessorio chirurgico che si fissa alle frese per facilitare il lavoro poiché stabilisce la profondità dell'osteotomia, con conseguente maggiore sicurezza nella preparazione del sito chirurgico.



# Protocollo chirurgico

## Caratteristiche del sistema di fresatura ZM4

### ■ Dettaglio interno della scatola chirurgica ZM4

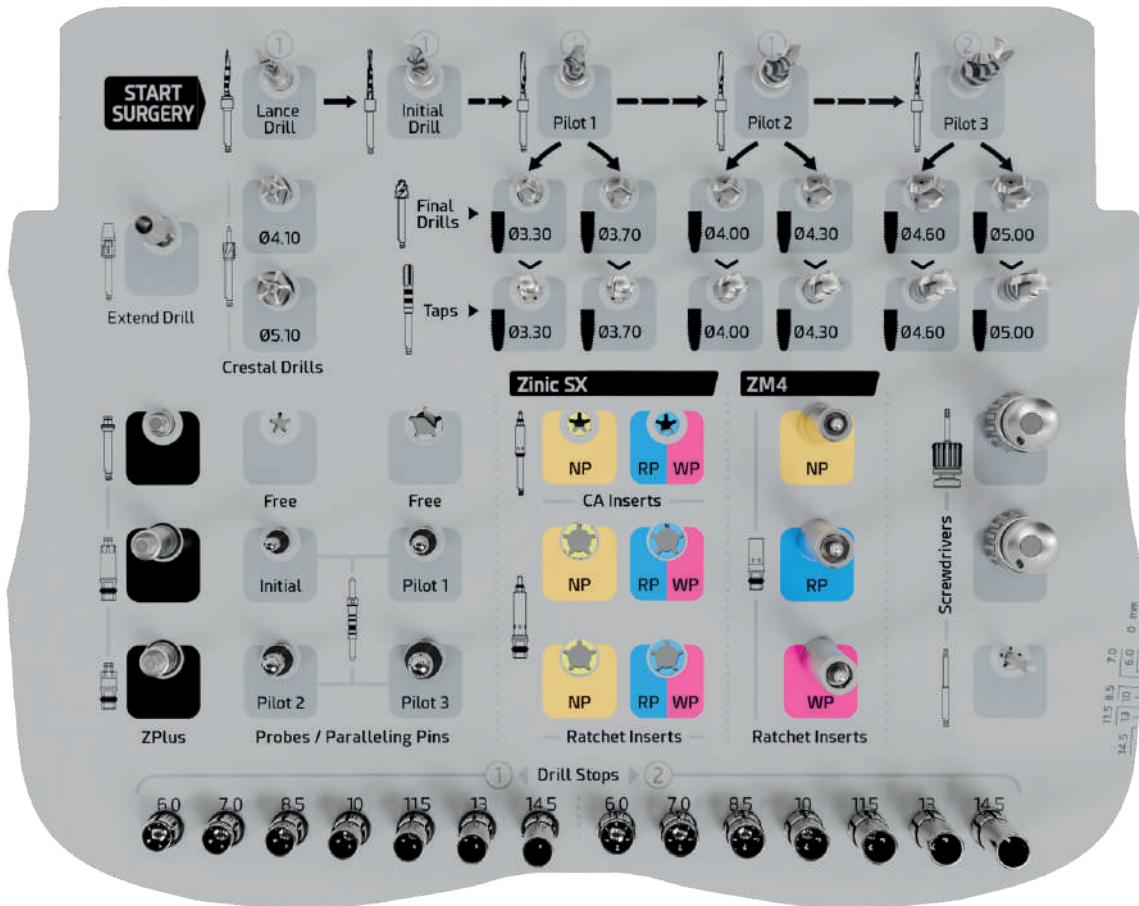

## Raccomandazione sul torque massimo di inserimento dell'impianto



Il torque di inserimento consigliato è compreso tra **35 e 50 Ncm** in base al caso specifico.

Per evitare la deformazione della chiave e/o della connessione dell'impianto, l'inserimento con contrangolo (CA) deve rispettare i giri/min massimi raccomandati (25 giri/min) e il torque massimo indicato (50 Ncm).

Se il torque massimo consigliato non consente di ottenere l'inserimento completo dell'impianto, è necessario rimuovere l'impianto e ripetere la fresatura per eseguire un nuovo inserimento in un secondo momento.

Controllare il torque di inserimento finale con la chiave dinamometrica regolabile Rif. TORK50 o con contrangolo.

Il superamento del torque (50 Ncm) per l'inserimento dell'impianto può causare:

- Deformazioni irreversibili nella connessione interna dell'impianto.
- Deformazioni irreversibili negli strumenti di inserimento dell'impianto.
- Difficoltà o impossibilità di smontare il gruppo strumento/impianto.

## ■ Impianto ZM4

Si deve tenere in considerazione che il protocollo di fresatura per gli impianti ZM4 con frese a gradini varia notevolmente in base al diametro dell'impianto e al tipo di osso del sito chirurgico, pertanto è necessario prestare particolare attenzione a questi due aspetti.

ZM4


- **ESEMPIO:**  
Impianto ZM4  
 $\varnothing 4,00 \times 11,50$  mm  
■ RP ( $\varnothing 4,00$  mm)  
Ø Piattaforma 3,50mm



## Procedura del protocollo di fresatura ad alta densità (D1 - D2\*)

### FASE PRELIMINARE | Apertura della gengiva

Praticare un'incisione e sollevare il lembo.

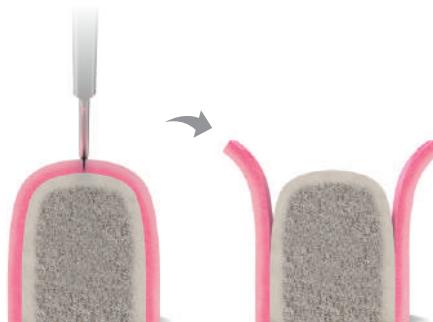

### FASE 1 | Frese lancia

Iniziare la sequenza di fresatura del sito chirurgico con la Fresa Lancia Rif. SID001M. Tenere d'occhio la marcatura laser della frese, che indica la lunghezza, o utilizzare lo stop per frese Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.



### FASE 2 | Frese Iniziale

Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Iniziale Rif. OTD00PSX fino a raggiungere la lunghezza totale corrispondente all'impianto selezionato. Tenere d'occhio la marcatura laser della frese che indica la lunghezza o usare lo stop per frese Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione di fresatura applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.



### FASE 3 | Sonda/Parallelizzatore Frese Iniziale

Verificare la profondità del sito chirurgico e l'asse di inserimento introducendo la Sonda/Parallelizzatore Fresa Iniziale MUR101. È possibile ripetere questo passaggio tutte le volte considerate necessarie durante l'intervento chirurgico.



# Protocollo chirurgico

## FASE 4 | Fresa Pilota 1



Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Pilota 1 Rif. OTD10PSX fino a raggiungere la lunghezza totale corrispondente all'impianto selezionato. Tenere d'occhio la marcatura laser della fresa, che indica la lunghezza, o utilizzare lo stop per fresa Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.



### NOTA

Una volta completata questa fase, per posizionare un impianto di diametro:

- Ø3,30 mm > Fresa Finale 1 (Rif. OTD33SX) + Maschiatore MTAPST33
- Ø3,60 mm > Fresa Finale 2 (Rif. OTD37SX) + Maschiatore MTAPST37

## FASE 5 | Sonda/Parallelizzatore Pilota 1



Verificare la profondità del sito chirurgico e l'asse di inserimento introducendo la Sonda/Parallelizzatore Pilota 1 Rif. MUR201. È possibile ripetere questo passaggio tutte le volte considerate necessarie durante l'intervento chirurgico.

## FASE 6 | Fresa Pilota 2



Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Pilota 2 Rif. OTD20PSX fino a raggiungere la lunghezza totale corrispondente all'impianto selezionato. Tenere d'occhio la marcatura laser della fresa, che indica la lunghezza, o utilizzare lo stop per fresa Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.



### NOTA

Una volta completata questa fase, per posizionare un impianto di diametro:

- Ø4,00 mm > Fresa Finale 3 (Rif. OTD40SX) + Maschiatore MTAPST40
- Ø4,40 mm > Fresa Finale 4 (Rif. OTD43SX) + Maschiatore MTAPST42

## FASE 7 | Sonda/Parallelizzatore Pilota 2



Verificare la profondità del sito chirurgico e l'asse di inserimento introducendo la Sonda/Parallelizzatore Pilota 2 Rif. MUR301MT. È possibile ripetere questo passaggio tutte le volte considerate necessarie durante l'intervento chirurgico.

## FASE 8 | Fresa Finale 3



Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Finale 3 Rif. OTD40SX fino a raggiungere la lunghezza corrispondente allo spessore della corticale ossea, in base a ciascun caso clinico. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.



## FASE 9 | Maschiatore Ø4,00



Posizionare il maschiatore chirurgico Ø4,00 Rif. MTAPST40 nel sito chirurgico. Premere con decisione e iniziare a girare lentamente, quindi lasciare che il maschiatore avanzi senza esercitare nessuna pressione fino alla profondità programmata. In caso di resistenza eccessiva, per ogni giro completo eseguire un movimento anti-rotazionale di 90°. Per rimuovere il maschiatore, girare nel senso inverso rispetto a quello di inserimento. Quando si usa il maschiatore è consigliabile passarlo lungo l'intera lunghezza dell'impianto.



## ■ Note importanti: Densità ossea di tipo D2\*

Nel caso di densità ossea di tipo D2, è necessario seguire il protocollo chirurgico di fresatura indicato per la densità ossea di tipo D1, eliminando l'uso del Maschiatore Chirurgico in tutti i diametri degli impianti. Tuttavia, sulla base dell'esperienza clinica e dell'identificazione del tipo di densità ossea della zona, spetta al professionista decidere l'uso totale o parziale del Maschiatore Chirurgico. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui la densità ossea varia significativamente lungo l'intera lunghezza dell'osteotomia per l'impianto.




# Protocollo chirurgico

## Procedura del protocollo di fresatura a bassa densità (D3 - D4\*\*)

### FASE PRELIMINARE | Apertura della gengiva

Praticare un'incisione e sollevare il lembo.

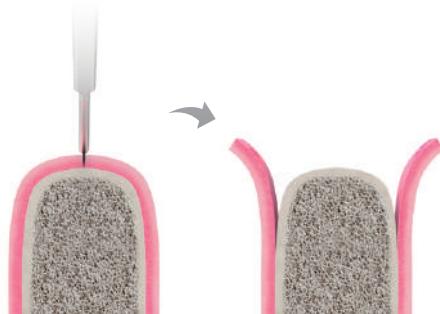

### FASE 1 | Fresa Lancia

Iniziare la sequenza di fresatura del sito chirurgico con la Fresa Lancia Rif. SID001M. Tenere d'occhio la marcatura laser della fresa, che indica la lunghezza, o utilizzare lo stop per fresa Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per fresa Rif. DEXT10.



### FASE 2 | Fresa Iniziale

Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Iniziale Rif. OTD00PSX fino a raggiungere la lunghezza totale corrispondente all'impianto selezionato. Tenere d'occhio la marcatura laser della fresa che indica la lunghezza o usare lo stop per fresa Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione di fresatura applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per fresa Rif. DEXT10.



#### NOTA

Una volta completata questa fase, per posizionare un impianto di diametro:

- Ø3,30 mm > Fresa Finale 1 (Rif. OTD33SX)
- Ø3,60 mm > Fresa Finale 2 (Rif. OTD37SX)

### FASE 4 | Fresa Pilota 1

Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Pilota1 Rif. OTD10PSX fino a raggiungere la lunghezza totale corrispondente all'impianto selezionato. Tenere d'occhio la marcatura laser della fresa, che indica la lunghezza, o utilizzare lo stop per fresa Rif. ZMPD115. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per fresa Rif. DEXT10.



#### NOTA

Una volta completata questa fase, per posizionare un impianto di diametro:

- Ø4,00 mm > Fresa Finale 3 (Rif. OTD40SX)
- Ø4,40 mm > Fresa Finale 4 (Rif. OTD43SX)

### FASE 3 | Sonda/Parallelizzatore Fresa Iniziale

Verificare la profondità del sito chirurgico e l'asse di inserimento introducendo la Sonda/Parallelizzatore Fresa Iniziale MUR101. È possibile ripetere questo passaggio tutte le volte considerate necessarie durante l'intervento chirurgico.



### FASE 5 | Sonda/Parallelizzatore Pilota 1

Verificare la profondità del sito chirurgico e l'asse di inserimento introducendo la Sonda/Parallelizzatore Pilota 1 Rif. MUR201. È possibile ripetere questo passaggio tutte le volte considerate necessarie durante l'intervento chirurgico.



## FASE 7 | Fresa Finale 3



Proseguire la sequenza di fresatura con la Fresa Finale 3 Rif. OTD40SX fino a raggiungere la lunghezza corrispondente allo spessore della corticale ossea, in base a ciascun caso clinico. Controllare la direzione e l'inclinazione della fresatura, applicando una pressione intermittente sempre in direzione verticale, prestando attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sull'osso. Se necessario, utilizzare la prolunga per frese Rif. DEXT10.

**■ Note importanti: Densità ossea di tip D4\*\***

Nel caso di densità ossea di tipo D4, è necessario seguire il protocollo chirurgico di fresatura indicato per la densità ossea di tipo D3, eliminando l'uso dell'ultima Fresa Finale per tutti i diametri degli impianti. Tuttavia, sulla base dell'esperienza clinica e dell'identificazione del tipo di densità ossea della zona, spetta al professionista decidere l'uso totale o parziale dell'ultima Fresa Finale. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui la densità ossea varia significativamente lungo l'intera lunghezza dell'osteotomia per l'impianto.


# Protocollo chirurgico

## Inserimento dell'impianto con Mount ZPlus | Titansure

### Mount ZPlus


Trattamento superficiale

**Titansure**

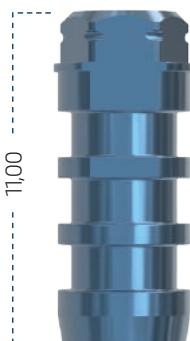

### FASE 1 | Apertura della confezione dell'impianto

- 11 Premere sulla parola "PRESS" e rompere la scatola di cartone.
- 12 Rimuovere la linguetta dalla scatola ed estrarre il blister.
- 13 Rimuovere con attenzione il sigillo del blister.
- 14 Lasciar cadere la boccetta portaimpianto su un panno sterile nella zona chirurgica.
- 15 Ricordarsi di rimuovere l'etichetta identificativa dell'impianto per attaccarla al passaporto impiantare e alla cartella clinica del paziente e mantenere in questo modo la tracciabilità del prodotto.

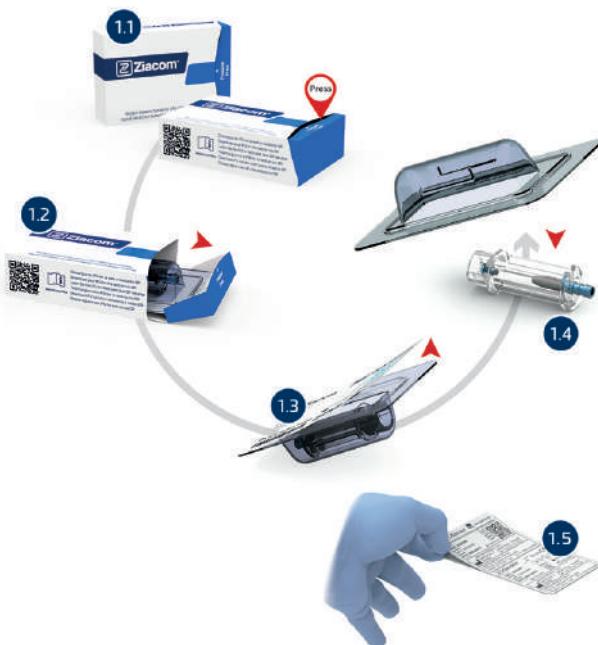


### FASE 2 | Scelta dello strumento di inserimento

A seconda della situazione clinica e dell'accesso all'area, è possibile scegliere tra tre strumenti diversi per inserire l'impianto:

- A Contrangolo:** utilizzare la chiave di inserimento ZPlus. CA della lunghezza desiderata (Rif. 01MMIN / 02MMIN) da inserire nel contrangolo.
- B Chiave dinamometrica Rif. TORK50:** utilizzare la chiave di inserimento ZPlus. Chiave dinamometrica/Manuale della lunghezza desiderata (Rif. XSMIN / TSMIN / TLMIN) da inserire nella chiave dinamometrica con la funzione "IN" identificata da una freccia.
- C Impugnatura per cacciavite 4x4 Rif. MADW10:** utilizzare la chiave di inserimento ZPlus. Chiave dinamometrica/Manuale della lunghezza desiderata (Rif. XSMIN / TSMIN / TLMIN) da inserire nell'impugnatura per cacciavite.


### FASE 3 | Estrazione dell'impianto dalla relativa boccetta

Tenere la boccetta portaimpianto con una mano e con l'altra inserire la chiave di inserimento selezionata nel ZPlus. Rimuovere il gruppo di impianto-mount sollevando in direzione verticale.

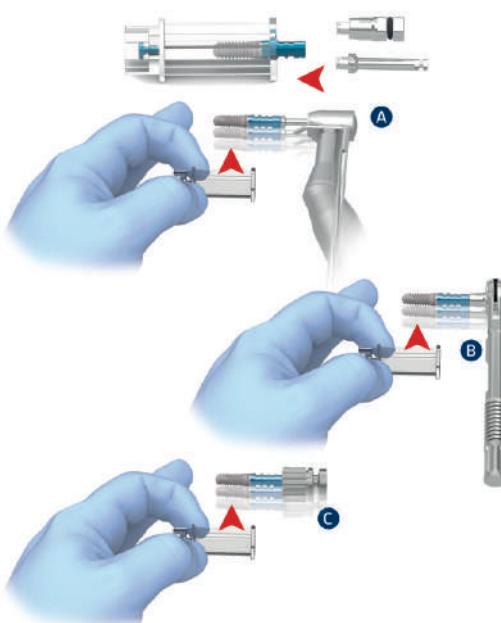

# Inserimento dell'impianto ZM4 con Mount ZPlus

## FASE 4 | Inserimento dell'impianto

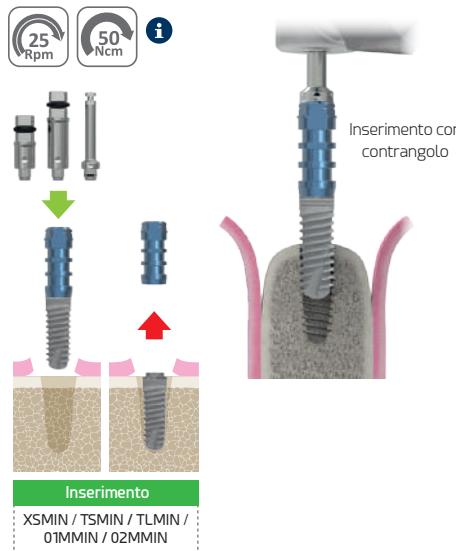

Inserire l'impianto nel sito chirurgico controllando la direzione e l'inclinazione. In caso di inserimento con contrangolo, utilizzare una velocità massima di 25 giri/min. Il torque di inserimento consigliato è compreso tra 35 e 50 Ncm in base al caso specifico, senza limitarsi ad un unico torque.

In caso di resistenza durante l'inserimento, si consiglia di girare leggermente l'impianto in senso antiorario e dopo alcuni secondi di pausa proseguire con l'inserimento. Ripetere questa procedura tutte le volte necessarie.

Il protocollo chirurgico Ziacom® stabilisce la posizione crestale della piattaforma dell'impianto.


Il ZPlus è dotato di 3 lati piatti. Al termine dell'inserimento dell'impianto, assicurarsi che uno di essi corrisponda all'area vestibolare.



Dispone di chiavi di inserimento dirette sull'impianto Rif. SMEX20/SMEX34/SMEX50 per Chiave dinamometrica/Manuale e MMEX20/MMEX34/MMEX50 per CA, per regolare la posizione finale dell'impianto.


## FASE 5A | Smontaggio del Mount ZPlus

Bloccare il Mount ZPlus con la chiave di bloccaggio Rif. 01MOHW, quindi rimuovere la vite con il cacciavite chirurgico manuale Rif. SMSD / LMSD. Una volta rimossa la vite, estrarre manualmente il ZPlus.

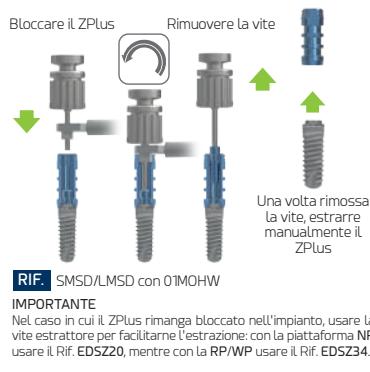

## FASE 5B | Smontaggio del Mount ZPlus

Per evitare la deformazione del Mount ZPlus o la saldatura a freddo con l'impianto, il punto di inserimento in cui va smontato dipenderà dal tipo di osso.

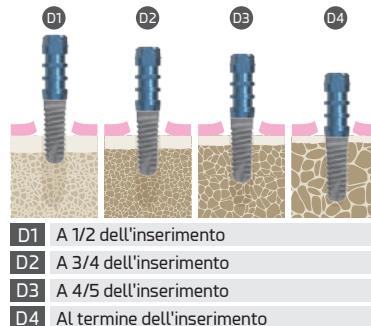


## IMPORTANTE

Il torque massimo di inserimento degli impianti dentali è pari a 50 Ncm. Il superamento del torque di inserimento massimo indicato per gli impianti può causare gravi danni all'impianto dentale, alla relativa connessione, al Mount e alla vite clinica inclusa. Fare riferimento alle considerazioni specifiche presenti nel protocollo chirurgico sulla rimozione del Mount a seconda del tipo di connessione dell'impianto e del tipo di osso.

## FASE 6 | Posizionamento crestale dell'impianto

La piattaforma degli impianti ZM4 di Ziacom® deve essere posizionata al livello della cresta ossea.

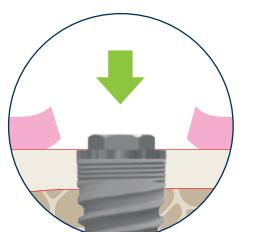

Posizione crestale  
CONSIGLIATA

# Protocollo chirurgico

## ■ Condizionamento dei tessuti molli

### FASE 1 | Posizionamento della vite di fissaggio

Rimuovere la vite di fissaggio con il cacciavite chirurgico manuale Rif. SMSD o LMSD procedendo in senso antiorario. Avvicinare la vite all'impianto evitando che cada e che venga ingerita accidentalmente. Inserirla nell'impianto fino in battuta applicando il torque manuale e in senso orario. Il posizionamento della vite di fissaggio durante la prima fase chirurgica richiede che, dopo il periodo di osteointegrazione, venga eseguita la seconda fase chirurgica o venga scoperto l'impianto per posizionare l'abutment scelto.

In base al caso specifico, è possibile scegliere di non utilizzare una vite di fissaggio, ma di posizionare direttamente un abutment di guarigione.



### FASE 2 | Chiusura del tessuto molle

### FASE 2 | Chiusura del tessuto molle

Chiudere e suturare il tessuto molle, adattando i lembi con attenzione.




### FASE 3 | Individuazione ed estrazione della vite di fissaggio

Individuare l'impianto ed eseguire un'incisione fino a scoprire la vite di fissaggio o utilizzare il bisturi circolare Rif. MPU34 sui tessuti molli. Estrarre la vite con il cacciavite chirurgico manuale Rif. SMSD o LMSD.



### FASE 4 | Posizionamento dell'abutment di guarigione

Inserire l'abutment di guarigione selezionato con il cacciavite chirurgico manuale Rif. SMSD o LMSD.

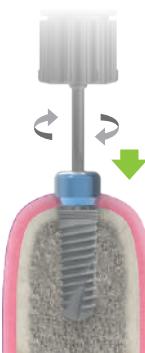

La scelta dell'abutment di guarigione dipenderà dal caso specifico. Deve corrispondere alla piattaforma dell'impianto ed essere conforme all'altezza del tessuto gengivale per evitare l'occlusione dell'abutment. Un'altezza eccessiva potrebbe sottoporre l'impianto a carichi prematuri, compromettendo così il processo di osteointegrazione.

## ■ Tipo di osso

Classificazione di Misch (1988)



OSSO DI TIPO D1

- Corticale densa e osso trabecolare denso.
- >1250 HU



OSSO DI TIPO D2

- Corticale porosa e osso trabecolare denso.
- 850 - 1250 HU



OSSO DI TIPO D3

- Corticale porosa e osso trabecolare fine.
- 350 - 850 HU



OSSO DI TIPO D4

- Scarsa corticale crestale e osso trabecolare fine.
- 150 - 350 HU


HU = Unità di Hounsfield

### NOTA IMPORTANTE

Per semplificare i protocolli chirurgici di fresatura, abbiamo creato alcune guide rapide di fresatura, nelle quali i criteri delle ossa di tipo D1-D2 vengono uniti nelle ossa ad "Alta Densità" e quelli di tipo D3-D4 nelle ossa a "Bassa Densità".

## ■ Manipolazione della vite di fissaggio

Posizionare la vite di fissaggio nel cacciavite. Avvicinare la vite all'impianto evitando che cada e che venga ingerita accidentalmente. Inserirla nell'impianto applicando il torque manuale e in senso orario.

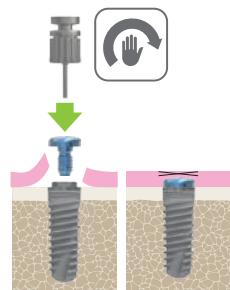

## ■ Considerazioni sulla protesizzazione provvisoria e il carico immediato

La protesizzazione provvisoria immediata e il carico immediato sono procedure che prevedono l'inserimento della protesi entro 72 ore dall'intervento di chirurgia implantare. La differenza fondamentale tra queste procedure è il carico funzionale o meno della protesi.

Un'adeguata stabilità primaria dell'impianto al momento dell'inserimento è fondamentale per considerare il posizionamento di una protesi provvisoria o il carico immediato. Questa stabilità può essere misurata oggettivamente mediante il torque di inserimento, che deve essere pari o superiore a 40-45 Ncm o mediante l'analisi della frequenza di risonanza (valore ISQ), che deve essere pari o superiore a 70.

### ■ PROTESIZZAZIONE PROVVISORIA IMMEDIATA

La protesizzazione provvisoria immediata implica un controllo approfondito dell'occlusione, sia in posizione centrica (chiusura) che durante i movimenti laterali o dinamici che si verificano durante la masticazione. Liberando il provvisorio da qualsiasi contatto in queste situazioni, si evita la trasmissione di forze all'impianto.

La protesizzazione provvisoria immediata ha i seguenti obiettivi principali:

- Chiusura immediata di spazi edentuli in aree estetiche.
- Rigenerazione guidata del profilo di emergenza gengivale grazie alla presenza della corona o del ponte provvisorio.

### ■ CARICO IMMEDIATO

Il principio del carico immediato implica, in modo controllato, la trasmissione dei contatti dal momento del posizionamento del restauro mentre rimane in occlusione, quindi si distinguono tra:

- Carico progressivo immediato mediante l'uso di un restauro provvisorio acrilico come primo restauro (rilasciato in occlusione dinamica).
- Carico immediato definitivo con materiale rigido e occlusione attiva fin dal primo giorno.

Entrambe le procedure comportano rischi per il successo dell'osteointegrazione dell'impianto, quindi il professionista, sulla base della sua esperienza clinica e del caso in questione, deve prendere in considerazione il posizionamento o meno di protesizzazione provvisoria immediata e/o il carico immediato.

# Protocollo chirurgico


## Restauri con transepiteliali

### ■ Abutment transepiteliali

- Consentono la formazione e la guarigione del tessuto perimplantare dalle prime 8 settimane.
- Il concetto "one abutment-one time" consente l'adesione gengivale alla sua superficie poiché non sono necessarie disconnessioni ripetute.
- Prevengono la perdita di tessuto osseo e di tessuto molle perché non vi è una rottura meccanica dell'interfaccia perimplantare.
- L'area del lavoro protesico rimane al di sopra del livello gengivale, rendendo più prevedibile il comportamento dell'adesione dei tessuti molli e mantenendo una buona tenuta.
- Minore formazione di micro-gap nella giunzione tra l'impianto e il componente protesico.
- Maggiore conservazione dell'osso crestale.
- Prove di protesi e posizionamento della protesi definitiva senza anestesia.
- Se il torque consigliato viene superato, la vite si frattura nel transepiteliale e non all'interno dell'impianto.

### ■ Altezze degli attacchi

- Una maggiore altezza dell'abutment equivale a una maggiore conservazione dell'osso marginale nelle protesi cementate.
- Gli abutment più alti ( $\geq 2$  mm) consentono un migliore adattamento dei tessuti molli.
- Gli abutment corti ( $< 2$  mm) possono comprimere i tessuti molli con conseguente maggiore perdita ossea a livello crestale.
- La perdita ossea marginale varia a seconda della decisione clinica in merito all'altezza dell'abutment. In genere, per gli abutment protesici  $\geq 2$  mm si avrà una conservazione migliore dell'osso crestale.

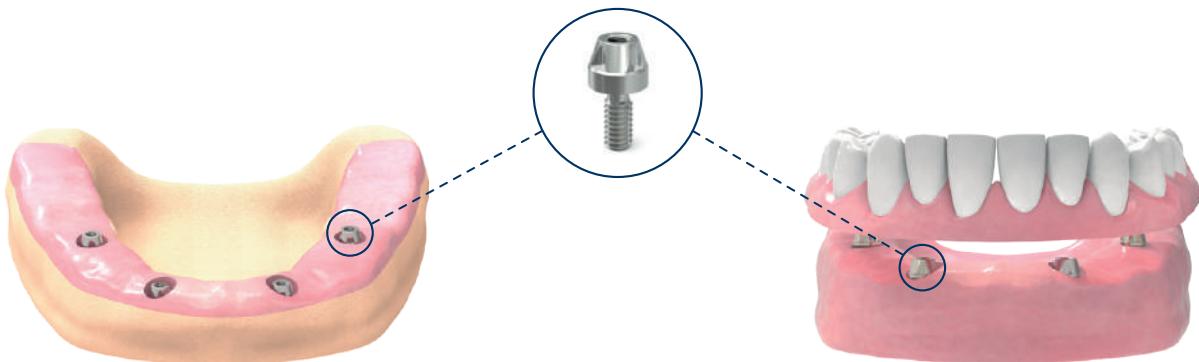

# Protocollo chirurgico semplificato

Queste guide chirurgiche sono state progettate con un protocollo chirurgico semplificato per eseguire una fresatura semplice ed efficiente del sito chirurgico.

## Protocollo di fresatura - ZPlus



 Rotazione



Richiede l'irrigazione



$\emptyset$  Diametro fresa




A circular icon containing a double-headed curved arrow, with the word "Torque" to its right.

**Le velocità indicate sono quelle consigliate**

**ZM4 Ø3,30** (Esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø3,30x115)

(Esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø3,30x11,5)

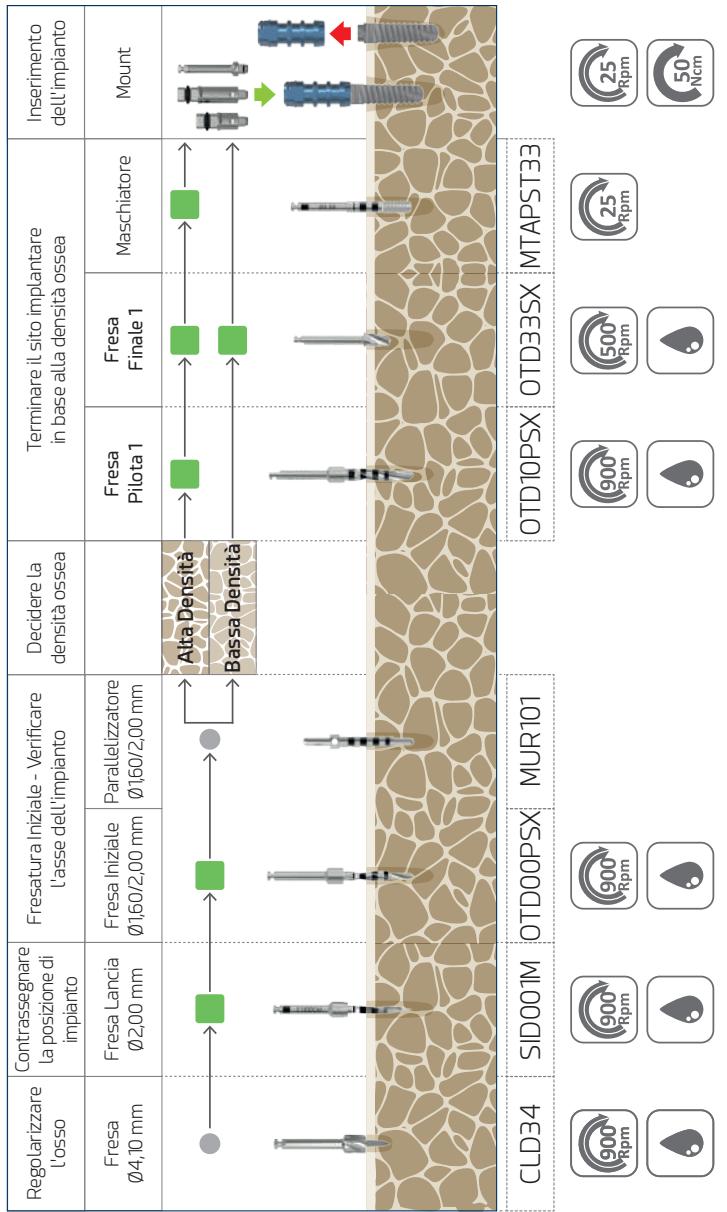


## Legenda

Sequenziale  
Opzionale

# Protocollo chirurgico semplificato

## ZM4 Ø3,70 (esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø3,70x115)

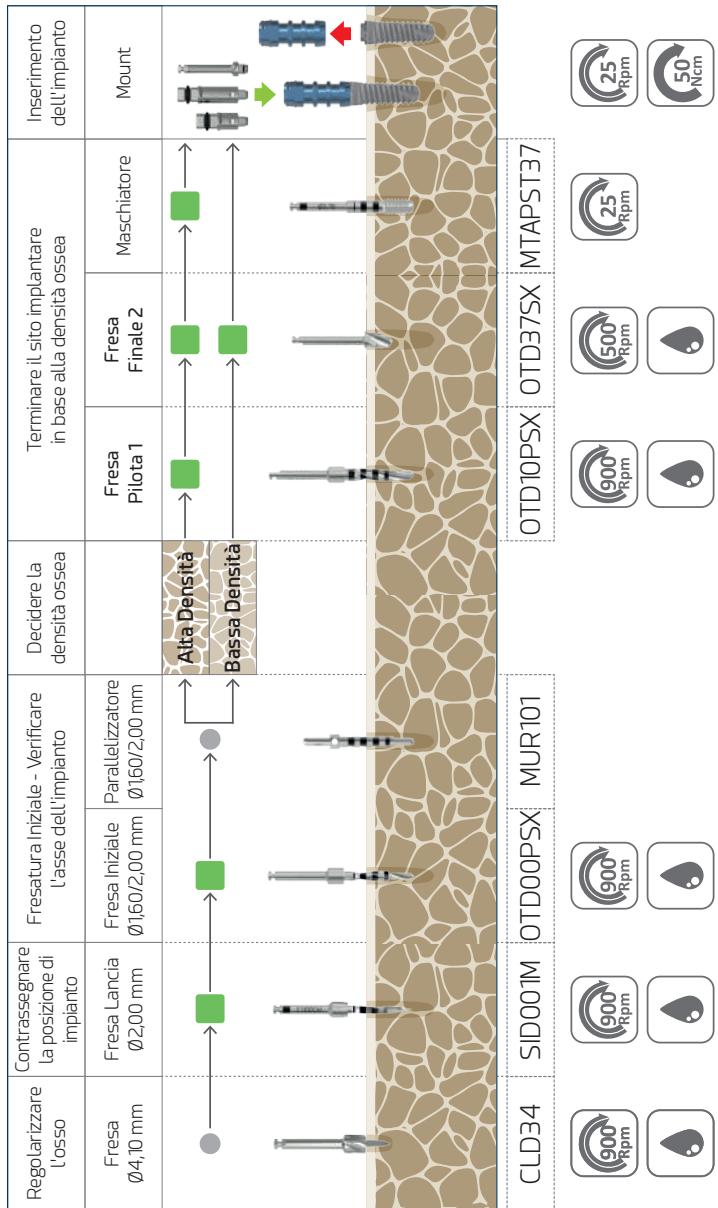


Legenda

- Opzionale
- Sequenziale

# ZM4 Ø4,00

(esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø4,00x115)

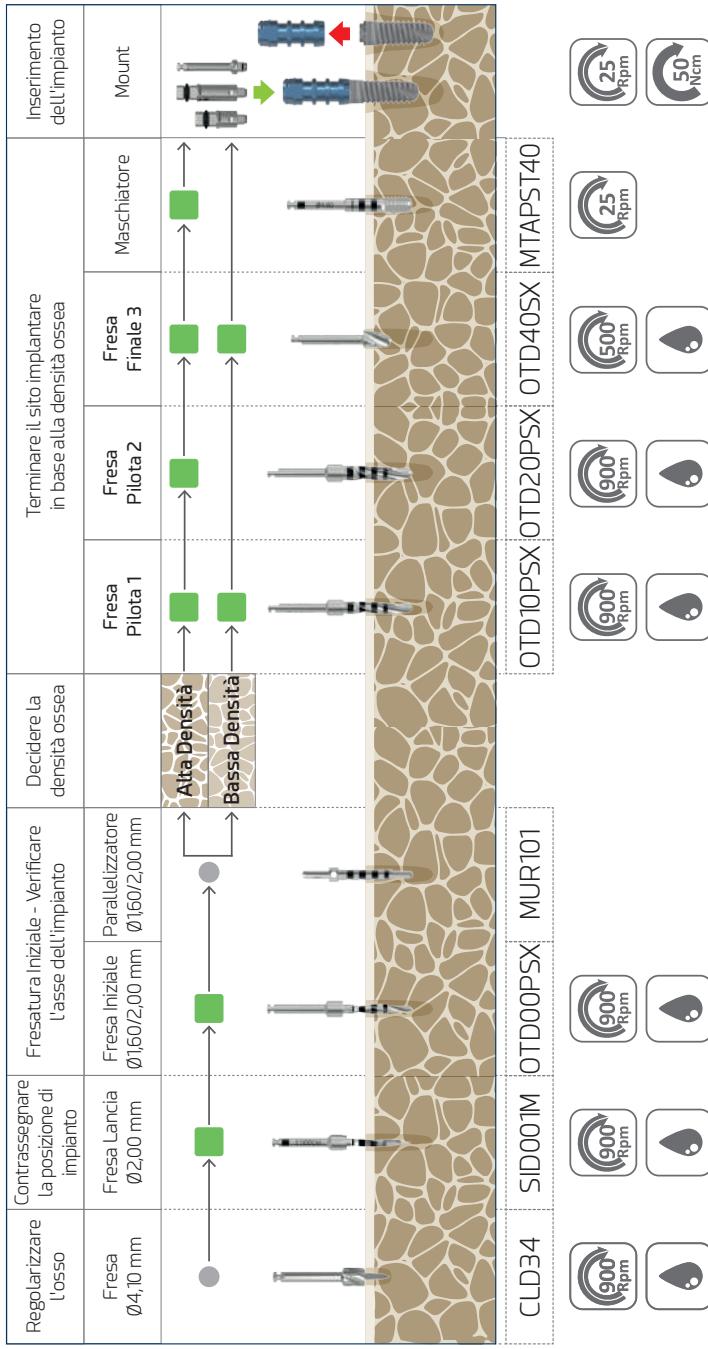


Legenda

- Opzionale
- Sequenziale


# Protocollo chirurgico semplificato

**ZM4 Ø4,30** (esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø4,30x115)

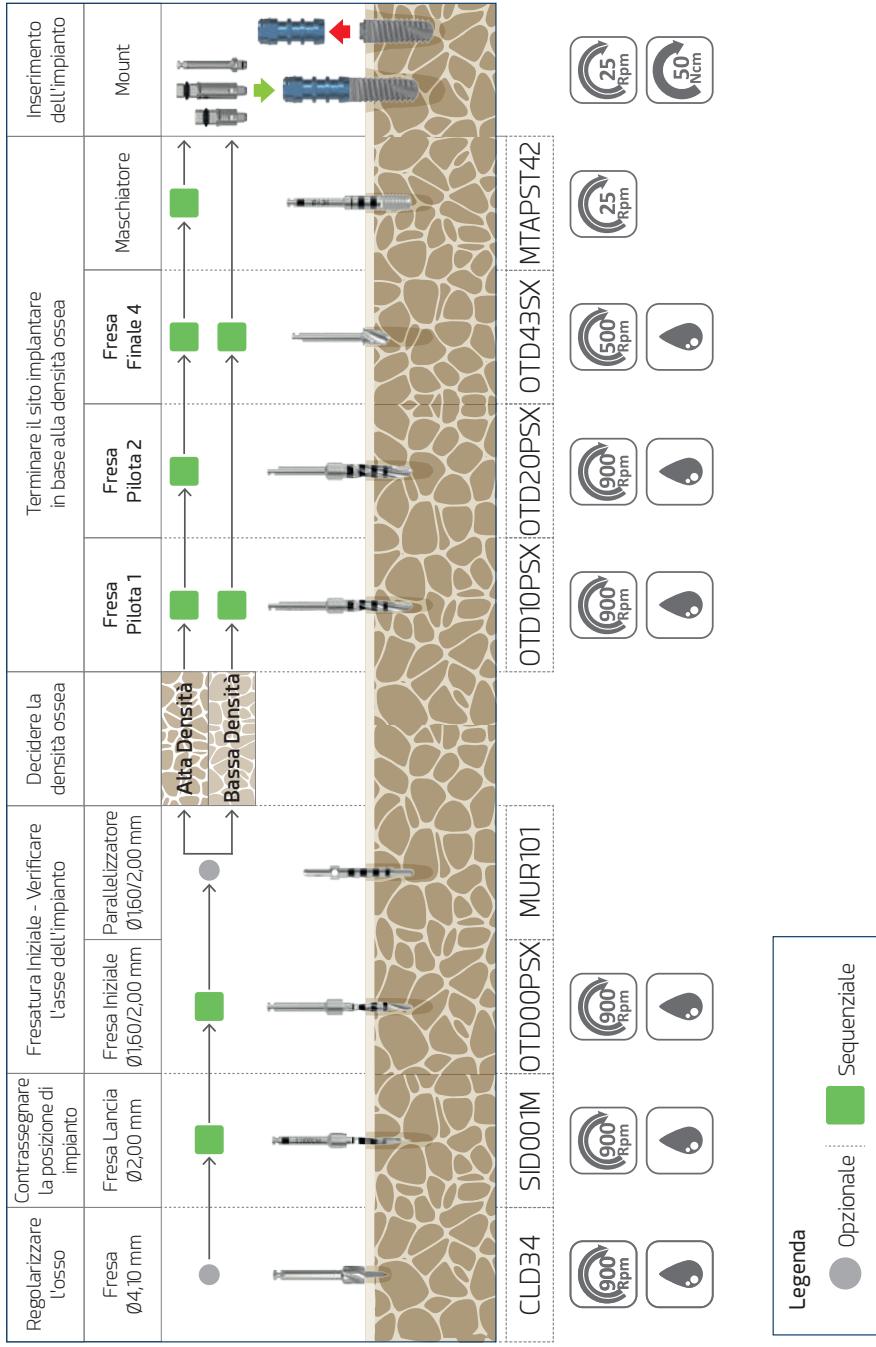

**ZM4 Ø4,60** (esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø4,60x115)

(esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø4,60x115)

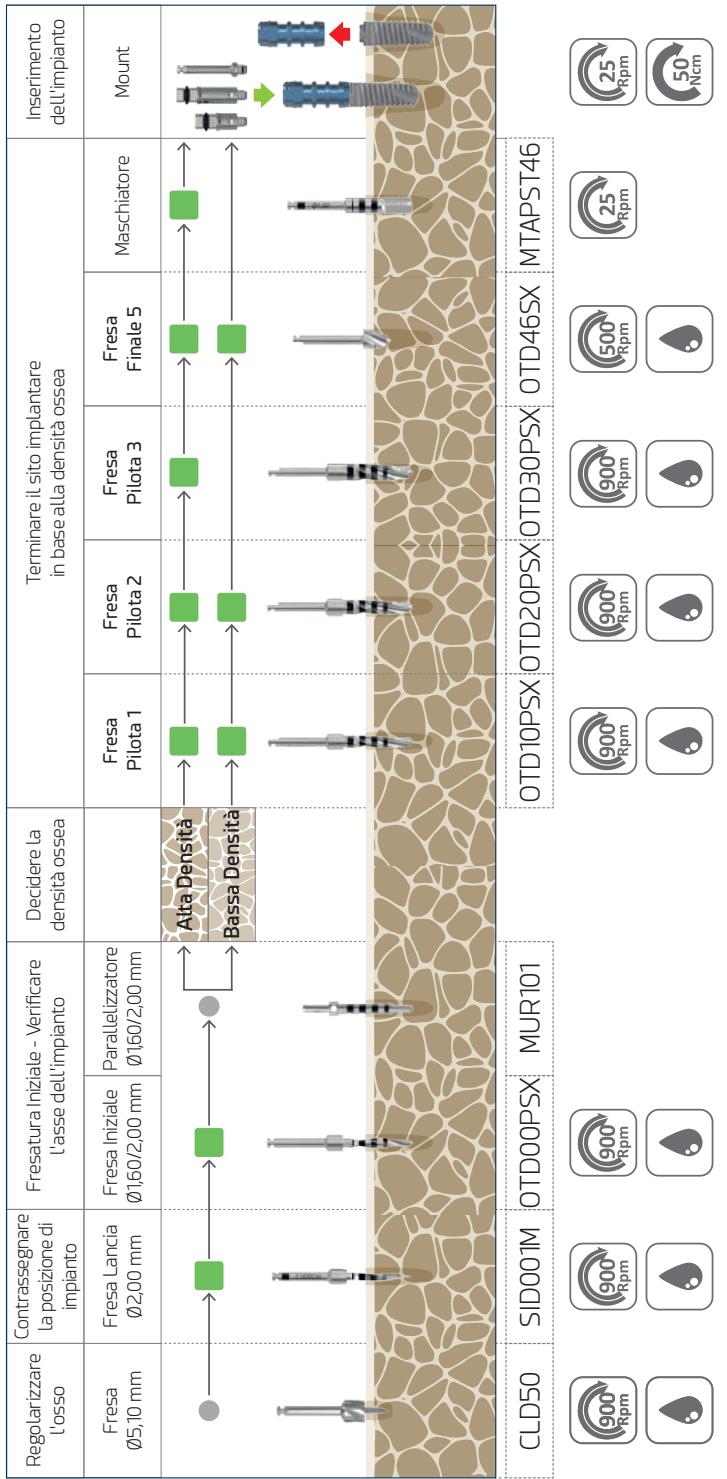


**Legenda**

	Sequenziale
	Opzionale

# Protocollo chirurgico semplificato

**ZM4 Ø5,00** (esempio di preparazione del sito implantare con impianto ZM4 Ø5,00x115)

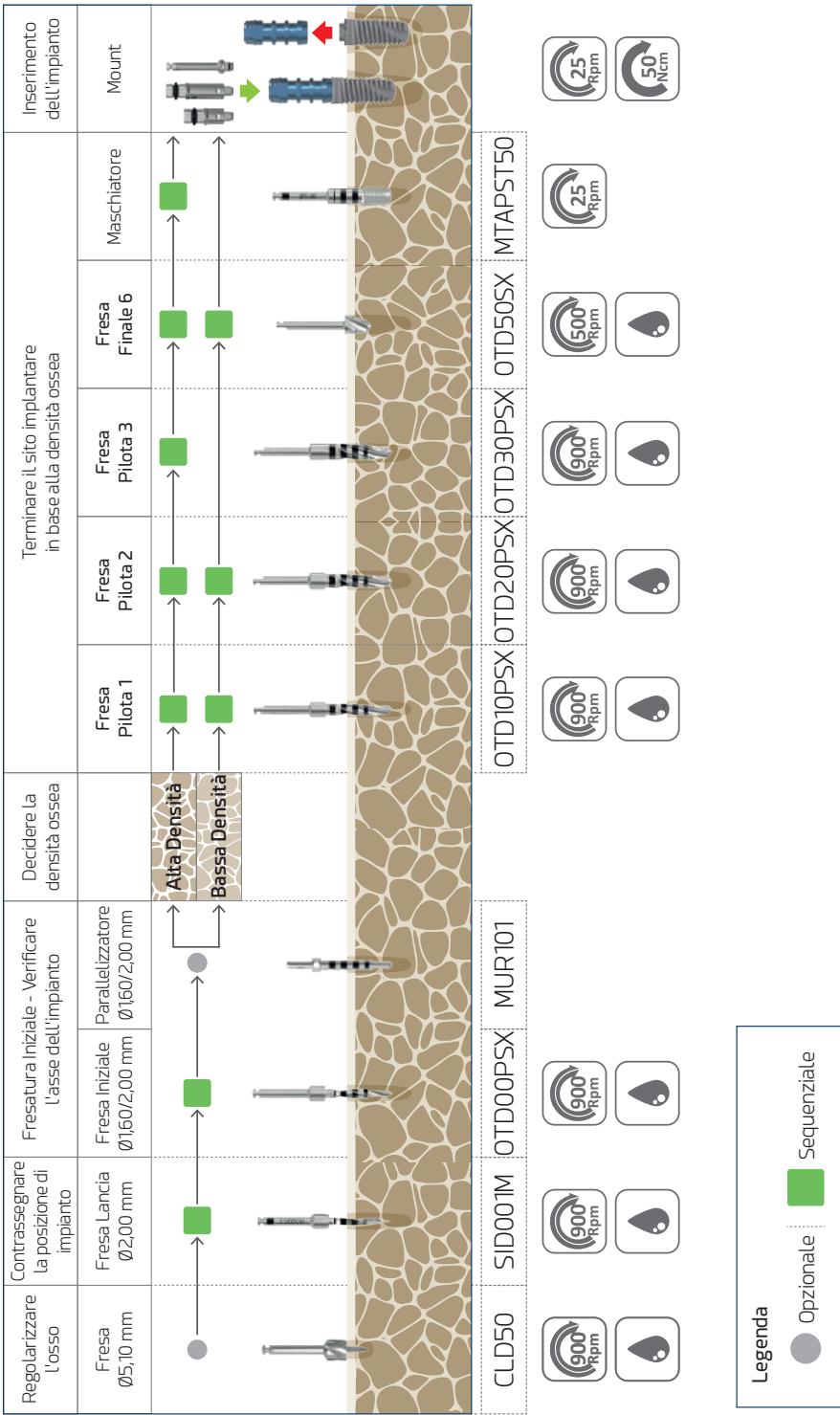

## Raccomandazioni generali

### ■ Da prendere in considerazione durante l'intervento

**1**

Le frese chirurgiche devono essere inserite nel contrangolo con il motore chirurgico fermo, garantendo l'ancoraggio corretto e la rotazione prima di iniziare la fresatura. Trattare le frese con la massima cura: il minimo danno alle punte può comprometterne l'efficacia.

**2**

Gli strumenti danneggiati devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.

**3**


L'implantologo deve conservare una delle etichette di identificazione fornite con il prodotto nella cartella clinica del paziente per una corretta tracciabilità.

**4**

Ogni strumento deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso specifico raccomandato dal produttore.

Consultare sempre i protocolli chirurgici e protesici pubblicati nel presente catalogo, nonché gli altri documenti disponibili nella sezione "Biblioteca" del nostro sito web [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca) relativi a procedure, protocolli e istruzioni per l'uso prima di utilizzare il sistema ZM4 di Ziacom®.



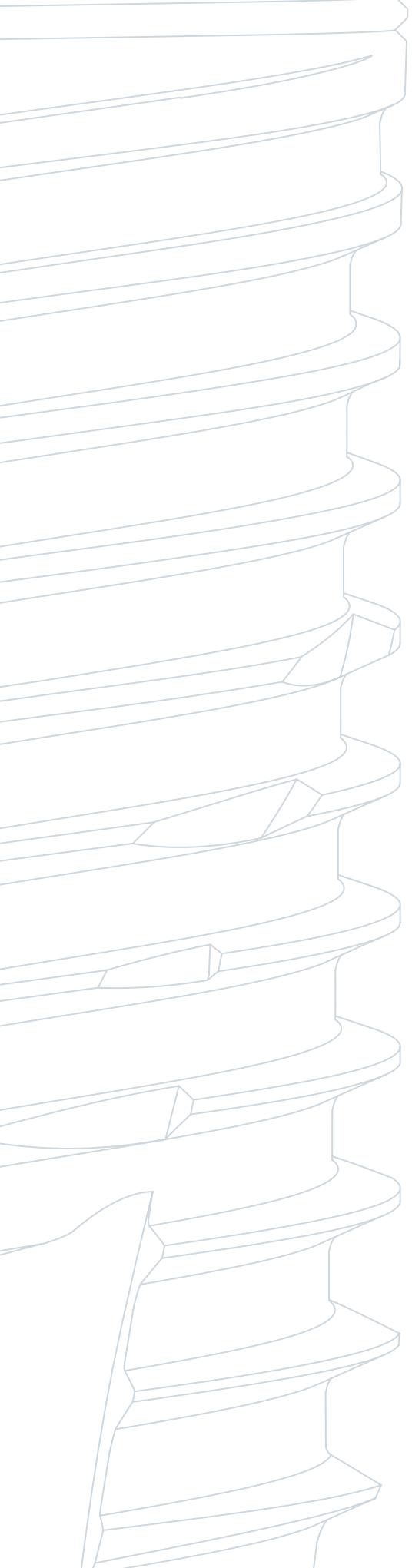

ZM4

Pulizia,  
disinfezione e  
sterilizzazione



# Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

I protocolli indicati di seguito devono essere implementati unicamente da personale qualificato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei materiali dentali descritti nel presente documento.

## Istruzioni per la pulizia e la disinfezione

Applicabili a strumenti, kit chirurgici e protesici.

### ■ Smontaggio

1. Smontare\* gli strumenti come richiesto, ad esempio chiavi a cricchetto manuali, frese o fermi per frese.
2. Per una corretta pulizia, smontare il kit chirurgico o protesico nei suoi diversi componenti.

### ■ Pulizia e disinfezione

Disinfezione di strumentario chirurgico e kit protesici:

1. Immergere gli strumenti in una soluzione detergente-disinfettante\*\* appropriata per facilitare la rimozione dei residui organici. Se si dispone di una vasca a ultrasuoni\*\*\*, verificare che il detergente o disinfettante sia adatto all'uso con tale apparecchiatura.
2. Rimuovere manualmente i residui organici con uno spazzolino non metallico e un detergente a pH neutro.
3. Risciacquare con abbondante acqua.
4. Per la pulizia dei kit chirurgici e protesici, utilizzare sempre detergenti a pH neutro e utensili non abrasivi, per evitare di danneggiare le superfici delle scatole.
5. Asciugare il materiale con carta in cellulosa monouso, panni che non lasciano residui o aria compressa.

Disinfezione delle cuffie in plastica e del disco di protezione:

1. Immergere per 10 minuti in una soluzione di cloruro di benzalconio puro.
2. Risciacquare con acqua distillata.
3. Prima dell'utilizzo, asciugare le cuffie e il disco.

### ■ Ispezione

1. Verificare che gli strumenti siano perfettamente puliti; in caso contrario, ripetere le fasi di pulizia e disinfezione.
2. Scartare gli strumenti danneggiati e sostituirli in vista dell'intervento chirurgico successivo.
3. Controllare che gli strumenti e i kit chirurgici e protesici siano perfettamente asciutti prima di assemblarli e sterilizzarli.

\*Consultare i manuali per l'assemblaggio e lo smontaggio all'indirizzo [www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)

\*\* Seguire le istruzioni del produttore del disinfettante per determinare le concentrazioni e i tempi.

\*\*\* Seguire le istruzioni del produttore della vasca a ultrasuoni per determinare la temperatura, la concentrazione e i tempi.

## Istruzioni per la sterilizzazione in autoclave a vapore

Applicabili a impianti ortodontici, attacchi, strumenti, kit chirurgici e protesici, chiodini, viti di fissaggio (o da osteosintesi) e mesh.

1. Introdurre il materiale in buste di sterilizzazione singole, che quindi vanno sigillate. Per la sterilizzazione congiunta, riporre gli strumenti nel kit chirurgico, inserire il kit in una busta da sterilizzazione e sigillare la busta.
2. Inserire le buste da sterilizzare nell'autoclave.
3. Sterilizzare in autoclave a vapore a 134°C/273°F (max. 137°C/276°F) per 4 minuti (minimo) a una pressione di 2 atmosfere. Le chiavi dinamometriche devono essere sterilizzate con 3 cicli di vuoto a 132 °C/270 °F per almeno ≥4 minuti e asciugate sotto vuoto per almeno 20 minuti.

**Solo per gli Stati Uniti:** Il ciclo di sterilizzazione convalidato e raccomandato negli Stati Uniti deve essere eseguito in un'autoclave a vapore, a 132°C/270°F, per un tempo minimo di 15 minuti e tempo di asciugatura di almeno 15-30 minuti.

#### IMPORTANTE

Assicurarsi che la fase di asciugatura sia stata completata per evitare che i prodotti rimangano umidi.

Se il materiale o le buste si presentano umide al termine della sterilizzazione, controllare l'autoclave.

Eseguire la manutenzione dell'autoclave realizzando le procedure necessarie con la periodicità consigliata, seguendo le istruzioni del produttore.



## Conservazione dei prodotti Ziacom®

- Conservare i prodotti nella confezione originale e in un ambiente pulito e asciutto fino al momento dell'utilizzo.
- Dopo la sterilizzazione, conservare i materiali nelle buste sigillate in un ambiente pulito e asciutto.
- Non superare mai le date di scadenza delle buste di sterilizzazione indicate dal produttore.
- Seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore delle buste di sterilizzazione.

## Raccomandazioni generali

- Non utilizzare mai materiale danneggiato o sporco e non riutilizzare prodotti destinati al monouso. L'utente è responsabile di seguire correttamente le istruzioni descritte in questo documento.
- Prestare attenzione agli elementi taglienti e affilati. Si raccomanda l'uso di guanti durante la pulizia del materiale per evitare incidenti durante l'utilizzo.
- Seguire le indicazioni di sicurezza fornite dal produttore del disinfettante.
- La sterilità non può essere garantita se la busta di sterilizzazione è aperta, danneggiata o bagnata.
- Rispettare tutte le fasi della sterilizzazione. Se i materiali o le buste di sterilizzazione presentano tracce di acqua o umidità, controllare l'autoclave e ripetere la sterilizzazione.
- Gli attacchi e gli impianti ortodontici vengono forniti NON STERILIZZATI e devono essere sterilizzati prima dell'uso.
- Gli strumenti, i kit chirurgici e protesici sono forniti NON STERILIZZATI e devono essere sterilizzati prima dell'uso e successivamente puliti e disinfettati.
- Le procedure di sterilizzazione, pulizia e disinfezione deteriorano progressivamente gli strumenti. Ispezionare accuratamente gli strumenti per individuare eventuali segni di usura.
- Evitare il contatto tra prodotti di materiali diversi (acciaio, titanio, ecc.) durante le procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.
- Per una corretta manutenzione e sicurezza dei prodotti, Ziacom Medical SL raccomanda di seguire le presenti istruzioni. L'azienda non è pertanto responsabile degli effetti che l'uso di procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione alternative da parte dell'utente può avere sui prodotti.

La versione più recente delle istruzioni per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione è disponibile all'indirizzo  
[www.ziacom.com/biblioteca](http://www.ziacom.com/biblioteca)





Consultare le condizioni generali di vendita aggiornate sul nostro sito web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com)

Verificare la disponibilità di ciascun prodotto in base al Paese.

Rimangono riservati tutti i diritti. Nessuna parte della presente documentazione può essere riprodotta, memorizzata su supporti o sistemi di riproduzione, trasmessa in qualsiasi forma o in qualsiasi circostanza, per via elettronica, meccanica, in fotocopie, in registrazioni o in altro modo non contemplato nel presente documento senza il permesso del proprietario dei diritti su marchio, modifica e stampa. Ziacom® è un marchio registrato di Ziacom Medical SL.

Consultare la versione più recente dei cataloghi disponibile sul sito web [www.ziacom.com](http://www.ziacom.com).







IT | ITALIANO



[www.ziacom.com](http://www.ziacom.com)

 **Ziacom®**  
A Ziacom Group Company